




Ce document est à destination des orthodontistes, chirurgiens maxillo-faciaux et chirurgien dentistes. Il décrit les indications des Mini-vis d'ancrage en fonction des sites d'implantation.

## Quelle mini-vis pour quel site d'implantation ?

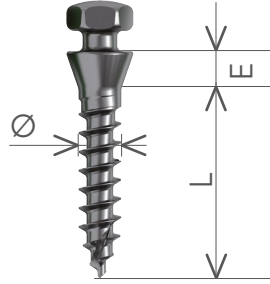

ZONE	Site d'insertion	Indications	Diamètre Ø	Longueur L	Epaulement E
<b>MAXILLAIRE</b>	Crête infra zygomatique	Ingression	1,5 - 2 mm	9 - 11 mm	Court - Long
	Tubérosité	Distalisation			
	Vestibulaire 6/7 et 5/6	Recul en masse Ingression molaire	1,2 - 1,5 mm	7 - 9 mm	Court 0,6 mm
	Vestibulaire 4/5 et 3/4	Ingression des incisives Contrôle du torque antérieur		7 mm	
	Zone antérieure	Mésialisation		6 - 7 mm	
<b>PALATINE</b>	Entre 6/7 et 5/6	Recul en masse Ingression molaire Mésialisation molaire	1,2 - 1,5 mm	9 - 11 mm	Court - Long
	Médian et para médian	Ancrage direct	1,5 - 2 mm	7 - 9 mm	Court 0,6 mm
<b>MANDIBULAIRE</b>	Rétromolaire	Distalisation molaire Correction axe molaire + egression	1,5 - 2 mm	9 - 11 mm	Court - Long
	Vestibulaire 6/7 et 5/6	Recul du bloc antérieur Ingression + mésialisation molaire	1,2 - 1,5 mm	7 mm	Court 0,6 mm
	Vestibulaire 4/5 et 3/4	Ingression secteur antérieur Mésialisation molaire		6 - 7 mm	
	Zone antérieure subapicale				
<b>EDENTEE</b>	Maxillaire et mandibulaire	Ancrage vestibulaire et linguale	1,5 - 2 mm	7 - 9 mm	Court - Long