


Quelle mini-vis pour quel site d'implantation ?

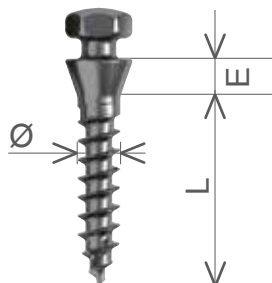

| ZONE | Site d'insertion | Indications | Diamètre Ø | Longueur L | Epaulement E |
|---------------------|-------------------------------|---|--------------|------------|--------------|
| MAXILLAIRE | Crête infra zygomatique | Ingression | 1,5 - 2 mm | 9 - 11 mm | Court - Long |
| | Tubérosité | Distalisation | | | |
| | Vestibulaire 6/7 et 5/6 | Recul en masse Ingression molaire | 1,2 - 1,5 mm | 7 - 9 mm | Court 0,6 mm |
| | Vestibulaire 4/5 et 3/4 | Ingression des incisives Contrôle du torque antérieur Mésialisation | | 7 mm | |
| | Zone antérieure | | | 6 - 7 mm | |
| PALATINE | Entre 6/7 et 5/6 | Recul en masse Ingression molaire Mésialisation molaire | 1,2 - 1,5 mm | 9 - 11 mm | Court - Long |
| | Médian et para médian | Ancrage direct | 1,5 - 2 mm | 7 - 9 mm | Court 0,6 mm |
| MANDIBULAIRE | Rétromolaire | Distalisation molaire Correction axe molaire + egression | 1,5 - 2 mm | 9 - 11 mm | Court - Long |
| | Vestibulaire 6/7 et 5/6 | Recul du bloc antérieur Ingression + mésialisation molaire | 1,2 - 1,5 mm | 7 mm | Court 0,6 mm |
| | Vestibulaire 4/5 et 3/4 | Ingression secteur antérieur Mésialisation molaire | | 6 - 7 mm | |
| | Zone antérieure subapicale | | | | |
| EDENTEE | Maxillaire et mandibulaire | Ancrage vestibulaire et linguale | 1,5 - 2 mm | 7 - 9 mm | Court - Long |

000F-MV SIT-INS-FR-Ed1-15