



In-Kone® FICHE TECHNIQUE

Chapitre 4 : Prothèse unitaire

Section 4-X : TiBase CEREC



ZI de Sacuny
118 Avenue Marcel Mérieux, 69530 BRIGNAIS
Tél : 04 78 56 97 00 – Fax : 04 78 56 01 63
www.globald.com

Ce document a pour but de préciser les préconisations d'utilisation des TiBase compatibles Cerec sur des implants EVL®, In-Kone® et twinKon®.



GlobalD propose une gamme de TiBase Conçues et fabriquées par nos soins. Ces TiBase respectent nos connectiques originales et leur partie coronaire est compatible avec les scanbodies et blocs de matériaux **compatibles CEREC***. Ces embases peuvent alors servir pour la réalisation de dents transvissées ou de piliers personnalisés via **le système CEREC***

Nos TiBases sont disponibles pour nos gammes d'implants In-Kone®, EVL® et twinKon®.

PROCEDURE

1. Utilisez la TiBase **Global D** et le scanbody **SIRONA** en fonction de la camera, selon le tableau d'équivalence ci-dessous :

2. ▼ *les composants suivants sont compatibles en fonction du raccordement*

Taille de raccordement	Scanbodies pour Omnicam /Primescan	Scanbodies pour Bluecam
S	6431311	6431295
L	6431329	6431303

3. **Scannage intra oral** : insérez la TiBase sur l'implant. Vissez la vis manuellement. Positionnez le Scanbody sur la TiBase. Réalisez l'empreinte optique. Sélectionnez dans la bibliothèque une référence équivalente selon nos propositions en dessous (Equivalent Bibliothèque). Déposez la TiBase et remettre en place la vis de cicatrisation nettoyée.
4. **Conception et fraisage** : à réaliser selon les procédures originales **CEREC***.
5. **Pose en bouche de la restauration** : serrage de la vis de prothèse à l'aide de la clé 1,2 selon le couple de serrage recommandé pour nos implants (**In Kone®** 15 N.cm, **EVL®** 35 N.cm, **twinKon®** 20 N.cm).

GAMMES

In-Kone®

Référence	DEVCINK 4.4H0.6L 	DEVCINK 4.4H2L 	DEVCINK 4.4H3L 	DEVCINK 4.4H4L 
Hauteur parodontale	0.6 mm	2 mm	3 mm	4 mm
Equivalence Bibliothèque	NB RS 3.5	NB RS 3.5	NB RS 3.5	NB RS 3.5

EVL®

Taille	DEVCEVL3.3S 	DEVCEVL4L 	DEVCEVL5L 
Equivalence Bibliothèque	B C 3.4	B C 4.1	ZTSV 5.7 ou FX 5.5

twinKon®

Taille	DEVCTWK5H2.7L 
Equivalence Bibliothèque	B C 4.1

* CEREC est une marque déposée de Sirona Dental Systems GmbH ,

CHIRURGIE



- Extraction, implantation immédiate sur une 22
- Pose d'un implant InKone UNIVERSAL

PROTHESE



- Mise en place de la TiBase Global D
- Prise d'empreinte à l'aide d'un scan body CEREC* et choisir dans la bibliothèque une référence équivalente
- Réalisation de la dent transvissée et collage de cette dernière sur la TiBase



- Mise en place de la dent provisoire transvissée en bouche
- Serrage de la vis à 15 N.cm
- Obturation du puits d'accès à la vis



En cas de difficulté de positionnement en bouche du scanbody sur la TiBase, pour les implants In-Kone, il est possible de placer le scanbody sur la TiBase hors bouche et impacter doucement l'ensemble dans l'implant pour faciliter la prise d'empreinte.

Informations complémentaires

Les procédures de décontamination, nettoyage et stérilisation doivent être consultées avant utilisation du produit. La notice d'instructions le concernant est à retrouver sur notre site internet : <http://doc-globald.com/0246.pdf>

