



Global D Arsenale terapeutico

*twin*kon® 4


In-Kone® UNIVERSAL

In-Kone® PRIMO

Impianto 3.0

Impianti con spalla intra-crestale

La protesi

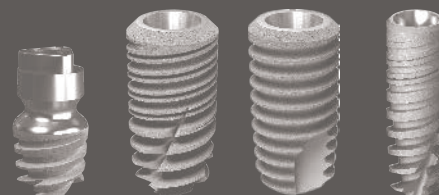



Partner per la vostra chirurgia

Global D è una società francese, specializzata nella creazione, produzione e commercializzazione di dispositivi medici di qualità destinati alla chirurgia maxillo-facciale, preimplantare e all'implantologia dentale.

Appassionati della nostra attività, promuoviamo stretti rapporti con i nostri clienti. Al di là dei prodotti che sviluppiamo con chirurghi esperti, sosteniamo tutti i nostri utilizzatori nel perfezionamento del loro esercizio. In questa ottica offriamo ai nostri clienti la possibilità di condividere la creazione di una fitta rete di colleghi, una vasta gamma di eventi, d'incontri e corsi di formazione.

Uguualmente ci impegniamo ad assicurare professionalità e competenza alla nostra forza vendita, fatta di consigli e prestazioni di servizio presso i chirurghi utilizzatori dei nostri prodotti. Forti della notevole sinergia tra i campi di attività praticati, rivendichiamo un significativo valor aggiunto in termini di esperienza e di potenziale d'innovazione in materia di chirurgia ossea dedicata all'armonia del viso e all'estetica del sorriso.



Global D - ZI de Sacuny - 118 av. Marcel Mérieux - 69530 Brignais - FRANCIA
tel. +33 (0)4 78 56 97 00 - fax +33 (0)4 78 56 01 63 - www.globald.com

Tekka Srl - Via degli Abeti, 348 - 61122 Pesaro (PU) - ITALIA
tel. (+39) 0721 40 36 63 - fax (+39) 0721 26 99 94 - www.tekkaglobald.it



Prodotti fabbricati
in Francia

Arsenale terapeutico Global D

Impianti con spalla intra-crestale

La protesi

Le gamme protesiche p.4

La gamma protesica In-Kone® p.6

Principi generali	p.6
Disegno del profilo di emergenza	p.6
Serraggio dei componenti protesici	p.7
Gamma dei componenti	p.8
Protesi cementata	p.11
Protesi avvitata unitaria	p.16
Protesi avvitata multipla	p.18
Stabilizzazione della protesi mobile	p.23
Strumentario protesico	p.26

La gamma protesica Impianto 3.0 p.28

Indicazioni	p.28
Concept	p.29
Gamma dei componenti	p.31

La gamma protesica twin^{kon}® 4 p.34

Indicazioni	p.34
Principi generali	p.35
Gamma dei componenti	p.36

Informazioni tecniche p.38

La lega di titanio medico TA6V, il materiale di scelta per l'implantologia	p.38
La connessione protesica al cuore del dispositivo impiantabile	p.40

Riferimenti dei prodotti p.42

Tutti i componenti protesici e tutti gli strumenti presentati devono essere puliti e sterilizzati prima dell'uso in bocca in conformità al protocollo descritto nel manuale di istruzioni.

Questi prodotti sono dispositivi medici di classe I, IIa e IIb, con marchio CE conformemente alla Direttiva 93/42/cee. E' possibile che i dispositivi medici presenti non siano disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni contattare il servizio commerciale di Tekka. Consultare le istruzioni prima dell'uso. In caso di dubbio contattare il servizio commerciale di TEKKA. Il foglio illustrativo può non essere presente, in tal caso un QR code, presente sull'etichetta, vi indirizza a un URL con le relative informazioni.

All'attenzione dell'utilizzatore.

Si prega di rispettare le istruzioni allegate al dispositivo. In caso di non rispetto delle sue raccomandazioni la società Global D si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità.

L'utilizzo dei sistemi di protesi su impianti Global D è riservato ai dentisti formati alla chirurgia implantare e al restauro protesico su impianti. La funzionalità del sistema è garantita a condizione che i pezzi siano originali. Per ogni copia non certificata proveniente da altro produttore Global D non si ritiene responsabile in caso di malfunzionamento del sistema. La verifica di un buono stato dei componenti nuovi o riutilizzati deve essere attuata dal dentista prima del posizionamento in bocca.

L'utilizzatore è responsabile della verifica del buon funzionamento dello strumentario prima di ogni intervento. E' sua responsabilità utilizzare e sterilizzare il materiale conformemente all'uso e alle norme in vigore. E' altresì sua responsabilità sostituire gli strumenti riutilizzabili giudicati difettosi o inadatti ad un corretto utilizzo.

NOTA : nel presente documento la denominazione In-Kone® UNIVERSAL corrisponde al riferimento In-Kone® UNIVERSAL SA²


Le gamme protesiche

Impianti con spalla intra-crestale

Le gamme protesiche corrispondenti agli impianti con spalla intra-crestale sono suddivise come indicato qui sotto. Le superfici di appoggio delle interfacce protesiche di tipo cono di frizionamento o cono morse secondo la linea del prodotto, assicurano una resistenza meccanica degli accostamenti, una stabilità protesica ed un'ermeticità antibatterica.

Corrispondenze Impianti e Gamme Protesiche

Gamma protesica In-Kone®

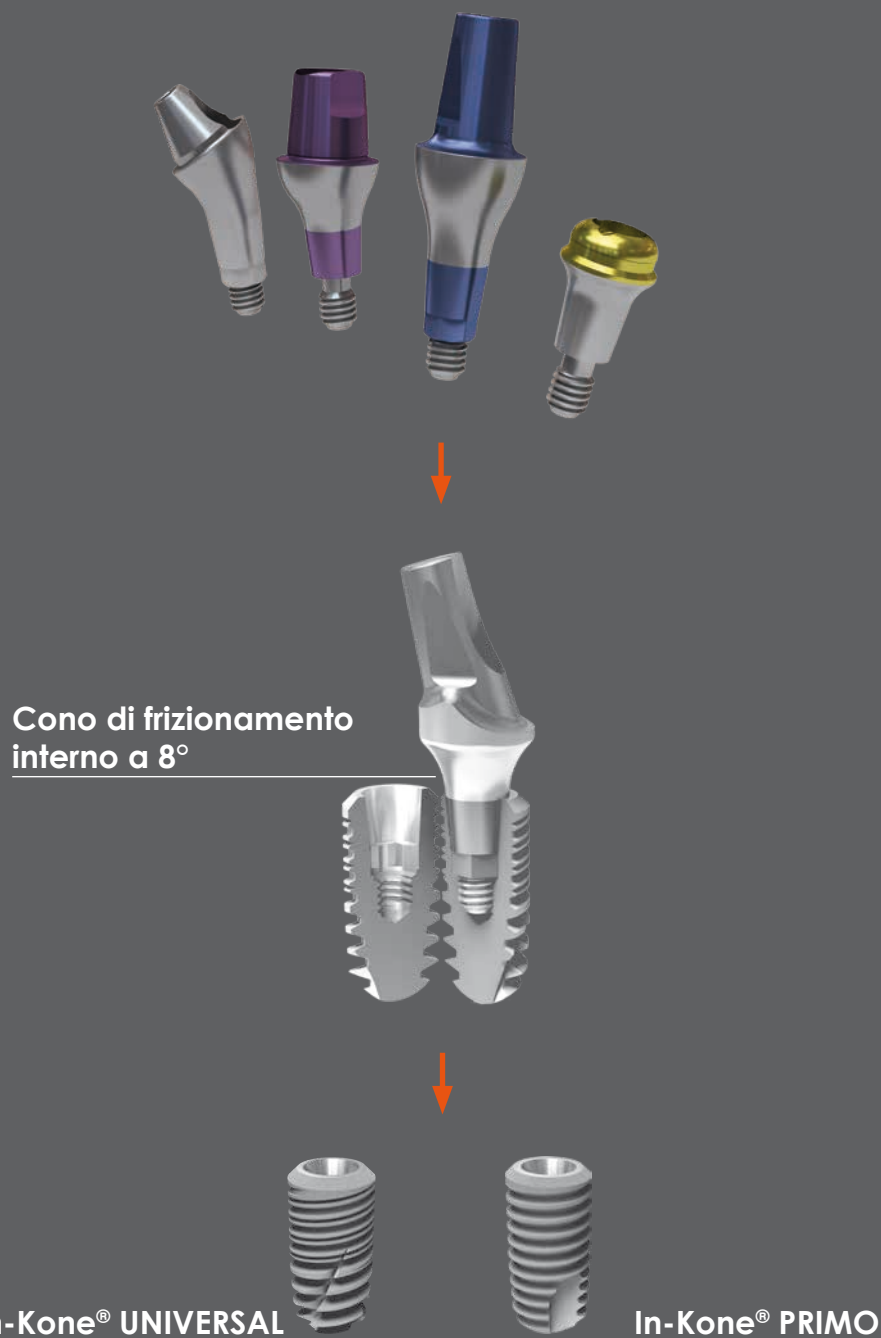

Gamma protesica Impianto 3.0




Cono interno
tipo morse a 5°



Impianto 3.0



Gamma protesica twinkon[®] 4

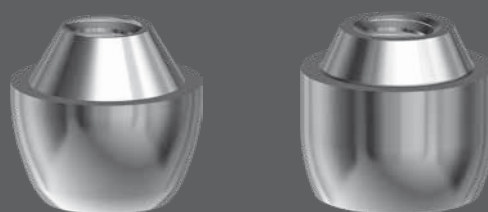

Cono esterno
tipo morse a 5°




twinkon[®] 4




La gamma protesica In-Kone®

Principi generali della protesi In-Kone®

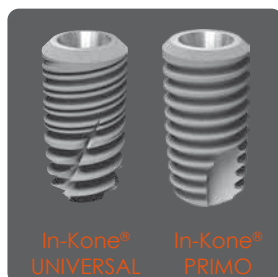

Gamma protesica comune

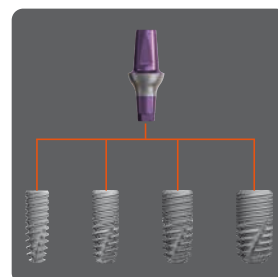

Connessione unica per tutti i
Ø 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 mm




Viti di guarigione
leggermente
sovradimensionata
(+0,1 mm al Ø)



Profili di emergenza
estetica concavi

Disegno del profilo di emergenza

1. Un disegno adattato ai profili dei tessuti

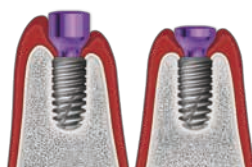

2. Codice colore e marcatura laser sulla testa delle viti



3. Leggibilità delle corrispondenze tra le viti ed i componenti di uso



rif. DVCICI5H4



rif. DFMPDVINK5H4

Serraggio dei componenti protesici

	Vite di guarigione	Moncone provvisorio titanio	Moncone profilato	Moncone standard	Moncone corto	Moncone misto diretto impianto	Base titanio	Pilastro conico	Pilastro conico angolato	Moncone misto per pilastro conico	Attacco sferico	Locator®	Vite di protesi per pilastro conico 0°	vite di protesi pilastro conico angolato
														
Indicazioni														
Unitaria	■	■	■	■	■	■	■							
Multipla	■		■	■	■			■	■	■				
Protesi														
Cementata fissa			■	■	■	■	■							
Avvitata fissa		■				■	■	■	■	■				
Mobile								■	■	■	■	■		
Coppia di serraggio	Manuale o 10 N.cm	15 N.cm	15 N.cm	15 N.cm	15 N.cm	15 N.cm	15 N.cm	20 N.cm	15 N.cm	15 N.cm	20 N.cm	20 N.cm	10 N.cm	10 N.cm

Locator® è un marchio depositato. Componente fabbricato da ZEST ANCHORS CEE 0473



Gamma dei componenti

Viti di guarigione



 Coppia di serraggio : Manuale (10 N.cm max)

Altezza parodontale	Altezza	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.5
1.5 mm	piatta	DVCICI4H1.5	DVCICI5H1.5	DVCICI6.5H1.5
1.5 mm	alta	DVCIHCI4H1.5	DVCIHCI5H1.5	DVCIHCI6.5H1.5
2.2 mm	piatta	DVCICI4H2.2	DVCICI5H2.2	DVCICI6.5H2.2
2.2 mm	alta	DVCIHCI4H2.2	DVCIHCI5H2.2	DVCIHCI6.5H2.2
3 mm	piatta	DVCICI4H3	DVCICI5H3	DVCICI6.5H3
3 mm	alta	DVCIHCI4H3	DVCIHCI5H3	DVCIHCI6.5H3
4 mm	piatta	DVCICI4H4	DVCICI5H4	DVCICI6.5H4
4 mm	alta	DVCIHCI4H4	DVCIHCI5H4	DVCIHCI6.5H4
5 mm	piatta	DVCICI4H5	DVCICI5H5	DVCICI6.5H5
5 mm	alta	DVCIHCI4H5	DVCIHCI5H5	DVCIHCI6.5H5
7 mm	piatta	DVCICI4H7	DVCICI5H7	
7 mm	alta	DVCIHCI4H7	DVCIHCI5H7	

Nota : Le viti di guarigione e di copertura sono monouso. Devono essere avvitate manualmente con l'aiuto del cacciavite esagonale 1.2 mm (rif. DCM1.2C / DCM1.2 / DCM1.2L).

In caso di uso con chiave dinamometrica, il serraggio massimo raccomandato è di 10 N.cm.

Cacciaviti



Transfert

Transfert per tecnica diretta su impianto


				
Transfert tecnica diretta	Pick-up corto + Vite DTCPICVCI*	Pick-up lungo + Vite DTLPICVCI*	Pick-up senza vite DTDCPICCI	Pick-up lungo senza vite DTDLPICCI
Vite singola	DVTCPICCI	DVTLPICCI		
Altezza	17.2 mm	19.7 mm	9 mm	13.7 mm

* Attenzione : Avvitamento manuale (o 10 N.cm max)

Cacciaviti / Chiavi di avvitamento



Personalizzazione del transfert diretto in bocca

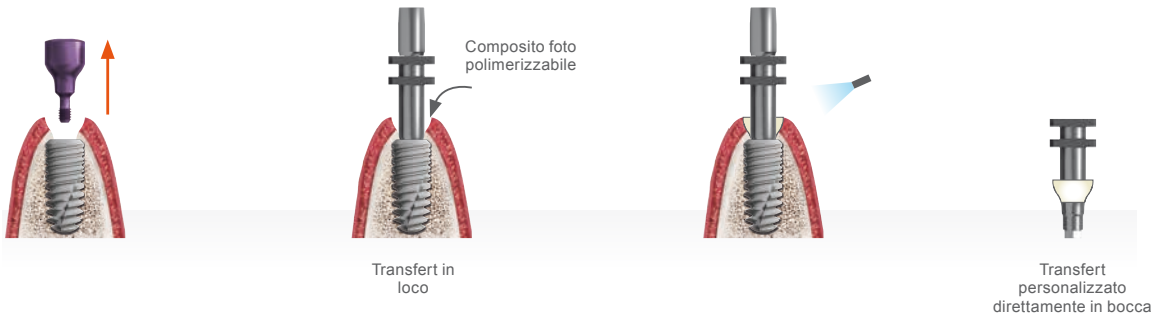

Transfert digitali 2 in 1

I **transfert digitali** Global D sono utilizzabili con le videocamere intraorali per prendere le impronte ottiche nel cavo orale e gli scanner da tavolo per la digitalizzazione dei modelli in gesso in laboratorio. Sono in titanio anodizzato duro e possono generalmente essere utilizzati senza impolveramento.

I transfert digitali si utilizzano per tutte le nostre soluzioni CAD/CAM. Le interfacce sono integrate nei principali software CAD di riferimento. Le nostre biblioteche sono disponibili su semplice richiesta.

I transfert della gamma **In-Kone®** sono proposti in versione **indicizzata diretta impianto**, con o senza vite di fissaggio, per la progettazione e la realizzazione di pilastri personalizzati.



Gamma	Riferimento		Descrizione
Impianti In-Kone® (unitario)	DTNVINK		Transfert digitale titanio per impianto In-Kone®, avvitato + vite
	DTNDINK		Transfert digitale titanio In-Kone®, monoblocco


Analogo d'impianto

Nota : Le ultime versioni di analoghi (gola piatta) di impianti In-Kone® possono essere utilizzati su modelli stampati.



DACI

Monconi provvisori

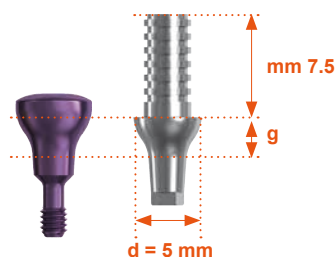


Coppia di serraggio : 15 N.cm

		
Altezza parodontale (g)	1.5 mm	3.0 mm
Riferimento	DFMPVCIH1.5	DFMPVCIH3


I monconi per le protesi provvisorie sono utilizzati solo per protesi unitarie o multiple non solidarizzate.

Protesi cementata

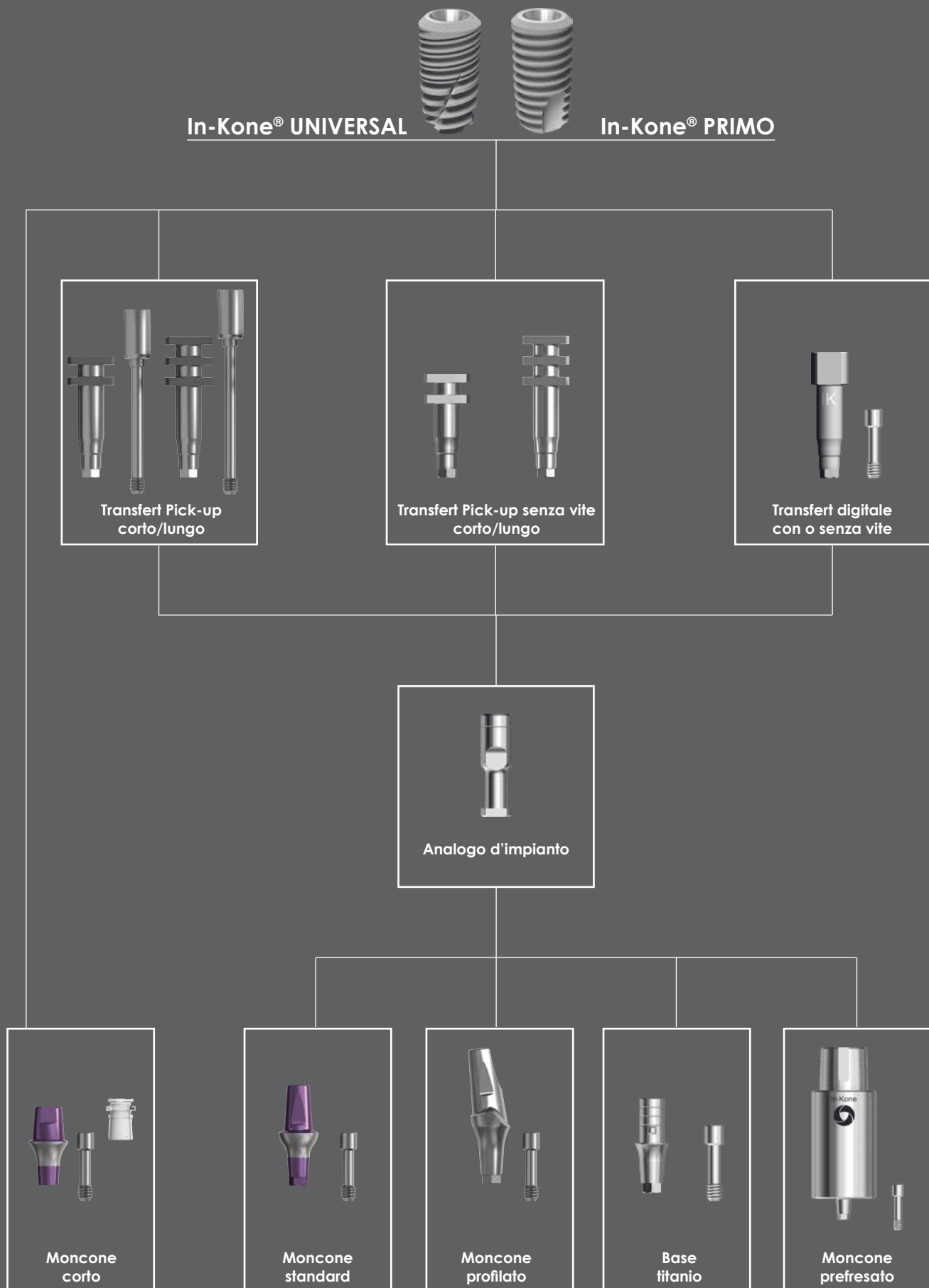

Monconi standard

I monconi standard sono concepiti per la maggior parte delle indicazioni di protesi cementate. La spalla convessa permette di essere ritoccata in laboratorio sul piano vestibolare.

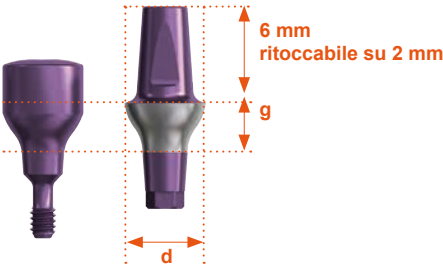

Coppla di serraggio : 15 N.cm

	Altezza parodontale (g)	Diametro di emergenza (d)		
		Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.5
 0°	1.5	DFMLTDVCI4H1.5	DFMLTDVCI5H1.5	DFMLTDVCI6.5H1.5
	2.2	DFMLTDVCI4H2.2	DFMLTDVCI5H2.2	DFMLTDVCI6.5H2.2
	3.0	DFMLTDVCI4H3	DFMLTDVCI5H3	DFMLTDVCI6.5H3
	4.0	DFMLTDVCI4H4	DFMLTDVCI5H4	DFMLTDVCI6.5H4
	5.0	DFMLTDVCI4H5	DFMLTDVCI5H5	DFMLTDVCI6.5H5
	7.0	DFMLTDVCI4H7	DFMLTDVCI5H7	
 7°	1.5	DFMLTAVCI4-7H1.5	DFMLTAVCI5-7H1.5	DFMLTAVCI6.5-7H1.5
	2.2	DFMLTAVCI4-7H2.2	DFMLTAVCI5-7H2.2	DFMLTAVCI6.5-7H2.2
	3.0	DFMLTAVCI4-7H3	DFMLTAVCI5-7H3	DFMLTAVCI6.5-7H3
	4.0	DFMLTAVCI4-7H4	DFMLTAVCI5-7H4	DFMLTAVCI6.5-7H4
	5.0	DFMLTAVCI4-7H5	DFMLTAVCI5-7H5	DFMLTAVCI6.5-7H5
	7.0		DFMLTAVCI5-7H7	
 15°	1.5	DFMLTAVCI4-15H1.5	DFMLTAVCI5-15H1.5	DFMLTAVCI6.5-15H1.5
	2.2	DFMLTAVCI4-15H2.2	DFMLTAVCI5-15H2.2	DFMLTAVCI6.5-15H2.2
	3.0	DFMLTAVCI4-15H3	DFMLTAVCI5-15H3	DFMLTAVCI6.5-15H3
	4.0	DFMLTAVCI4-15H4	DFMLTAVCI5-15H4	DFMLTAVCI6.5-15H4
	5.0	DFMLTAVCI4-15H5	DFMLTAVCI5-15H5	DFMLTAVCI6.5-15H5
	7.0		DFMLTAVCI5-15H7	
 23°	1.5	DFMLTAVCI4-23H1.5	DFMLTAVCI5-23H1.5	DFMLTAVCI6.5-23H1.5
	2.2	DFMLTAVCI4-23H2.2	DFMLTAVCI5-23H2.2	DFMLTAVCI6.5-23H2.2
	3.0	DFMLTAVCI4-23H3	DFMLTAVCI5-23H3	DFMLTAVCI6.5-23H3
	4.0	DFMLTAVCI4-23H4	DFMLTAVCI5-23H4	DFMLTAVCI6.5-23H4
	5.0	DFMLTAVCI4-23H5	DFMLTAVCI5-23H5	DFMLTAVCI6.5-23H5
	7.0		DFMLTAVCI5-23H7	

Cacciaviti



DCM1.2C



DCM1.2



DCM1.2L

Monconi profilati

Creati per rispondere ad una esigenza estetica, i monconi profilati sono concepiti per favorire l'ambiente naturale parodontale. Il profilo anatomico della spalla è concepito per i profili mucosi asimetrici, quando lo spessore palatino è spostato rispetto al livello vestibolare.



	Altezza parodontale (g)	Diametro di emergenza (d)		
		Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.5
 0°	1.5	DFMPDVINK4H1.5	DFMPDVINK5H1.5	DFMPDVINK6.5H1.5
	2.2	DFMPDVINK4H2.2	DFMPDVINK5H2.2	DFMPDVINK6.5H2.2
	3.0	DFMPDVINK4H3	DFMPDVINK5H3	DFMPDVINK6.5H3
	4.0	DFMPDVINK4H4	DFMPDVINK5H4	DFMPDVINK6.5H4
 7°	1.5	DFMPAVINK4-7H1.5	DFMPAVINK5-7H1.5	
	2.2	DFMPAVINK4-7H2.2	DFMPAVINK5-7H2.2	
	3.0	DFMPAVINK4-7H3	DFMPAVINK5-7H3	
	4.0	DFMPAVINK4-7H4	DFMPAVINK5-7H4	
 15°	1.5	DFMPAVINK4-15H1.5	DFMPAVINK5-15H1.5	DFMPAVINK6.5-15H1.5
	2.2	DFMPAVINK4-15H2.2	DFMPAVINK5-15H2.2	DFMPAVINK6.5-15H2.2
	3.0	DFMPAVINK4-15H3	DFMPAVINK5-15H3	DFMPAVINK6.5-15H3
	4.0	DFMPAVINK4-15H4	DFMPAVINK5-15H4	DFMPAVINK6.5-15H4

Cacciaviti



DCM1.2C



DCM1.2




DCM1.2L



Monconi corti

I monconi corti sono raccomandati per il settore posteriore, in particolare nel caso di edentulia unitaria o edentulia plurale non solidarizzata. Sono disponibili nelle versioni diritta e angolata a 7° e 15°. Senza indicizzazione, sono posizionati direttamente in bocca, il bloccaggio anti-rotazionale si effettua serrando la vite a 15 N.cm. L'impronta è realizzata direttamente utilizzando il cappuccio per impronta, nel quale sarà posizionato l'analogo del pilastro. Il loro utilizzo contribuisce a ridurre le manipolazioni intra-buccali.

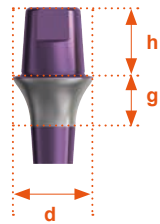

Coppia di serraggio : 15 N.cm

	Altezza parodontale (g)	Diametro di emergenza (d)= 4.0 Altezza coronale (h)= 6.0	Diametro di emergenza (d)= 5.0 Altezza coronale (h)= 4.0
 0°	1.5	DFMCRVCI4H1.5	DFMCRVCI5H1.5
	3.0	DFMCRVCI4H3	DFMCRVCI5H3
	5.0	DFMCRVCI4H5	DFMCRVCI5H5
 7°	1.5	DFMCARVCI4-7H1.5	DFMCARVCI5-7H1.5
	3.0	DFMCARVCI4-7H3	DFMCARVCI5-7H3
	5.0	DFMCARVCI4-7H5	DFMCARVCI5-7H5
 15°	1.5	DFMCARVCI4-15H1.5	DFMCARVCI5-15H1.5
	3.0	DFMCARVCI4-15H3	DFMCARVCI5-15H3
	5.0	DFMCARVCI4-15H5	DFMCARVCI5-15H5

	Altezza coronale (h)	Diametro di emergenza (d)	
		Ø 4.0	Ø 5.0
 Cappuccio di protezione*	4	DCCFMCCI4H4	DCCFMCCI5
	6	DCCFMCCI4H6	
 Cappuccio per impronta		DCPFMCCI4	DCPFMCCI5
 Analogo di moncone	4	DAFMCH4	DAFMCCI
	6	DAFMCH6	

*da impiantare meno di 30 giorni

Cacciaviti

DCM1.2C

DCM1.2

DCM1.2L

Base Titanio

Le basi in titanio Global D sono concepite per permettere la fabbricazione di monconi personalizzati in zirconio, la parte personalizzata è fissata alla base mediante incollatura.

Queste basi possono essere ugualmente utilizzate dal laboratorio per la realizzazione di protesi con tecnica convenzionale o digitale riportate poi da incollatura sulla base avvitata unitaria.

Diametro 3.8 mm

Ritoccabile su 2 mm



Coppia di serraggio : 15 N.cm

	Altezza parodontale (g)	d= 3.8
	2	DEVCI3.8H2
	3.0	DEVCI3.8H3
	4.0	DEVCI3.8H4

Diametro 5.5 mm

Ritoccabile su 2 mm



Coppia di serraggio 15 N.cm

	Altezza parodontale (g)	d= 5.5
	1.5	DEVCI5.5H1.5
	2.2	DEVCI5.5H2.2
	3.0	DEVCI5.5H3
	4.0	DEVCI5.5H4



Gli estrattori e le pinze sono diversi per le basi d = 5,5 mm, vedere pagina 26.

La chiave di avvitamento da utilizzare è il codice DCM1.2H *

Monconi prefresati Global D in versione originale

Concepiti e realizzati con cura e garanti delle nostre connessioni, i monconi prefresati (o «Pre-milled») Global D sono compatibili con il **montaggio brevettato S3DEL*** ed il software FAO **WorkNC Dental**. Permettono al laboratorio di realizzare pilastri su misura in titanio con la garanzia di una connessione che gode della precisione delle lavorazioni industriali.

* lista delle macchine disponibile su semplice richiesta.

Riferimento		Descrizione
DLABPMVINK		Moncone prefresato In-Kone® S3DEL



Coppia di serraggio : 15 N.cm

Cacciaviti



DCM1.2C



DCM1.2




DCM1.2L



*DCM1.2H

Protesi avvvitata unitaria

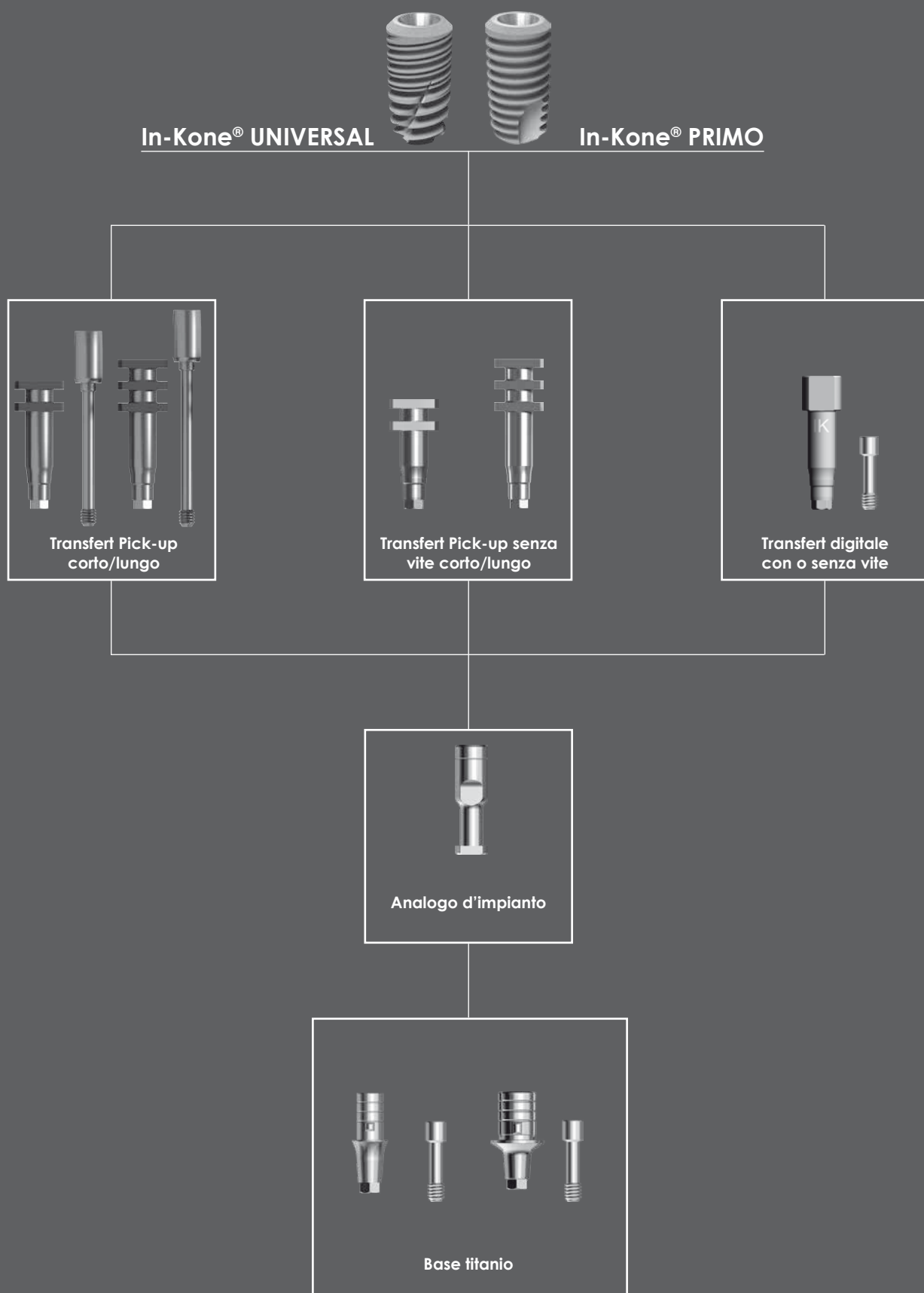

Base Titanio

Le basi in titanio Global D sono concepite per permettere la fabbricazione di monconi personalizzati in zirconio, la parte personalizzata è fissata alla base mediante incollatura.

Queste basi possono essere ugualmente utilizzate dal laboratorio per la realizzazione di protesi con tecnica convenzionale o digitale riportate poi da incollatura sulla base avvitata unitaria.

Diametro 3.8 mm

Ritoccabile su 2 mm



Coppia di serraggio : 15 N.cm

	Altezza parodontale (g)	d= 3.8
	2	DEVCI3.8H2
	3.0	DEVCI3.8H3
	4.0	DEVCI3.8H4

Diametro 5.5 mm

Ritoccabile su 2 mm



Coppia di serraggio 15 N.cm

	Altezza parodontale (g)	d= 5.5
	1.5	DEVCI5.5H1.5
	2.2	DEVCI5.5H2.2
	3.0	DEVCI5.5H3
	4.0	DEVCI5.5H4



Gli estrattori e le pinze sono diversi per le basi
d = 5,5 mm, vedere pagina 26.

La chiave di avvitamento da utilizzare è il codice
DCM1.2H *

Cacciaviti



DCM1.2C



DCM1.2




DCM1.2L



*DCM1.2H


Protesi avvitata multipla

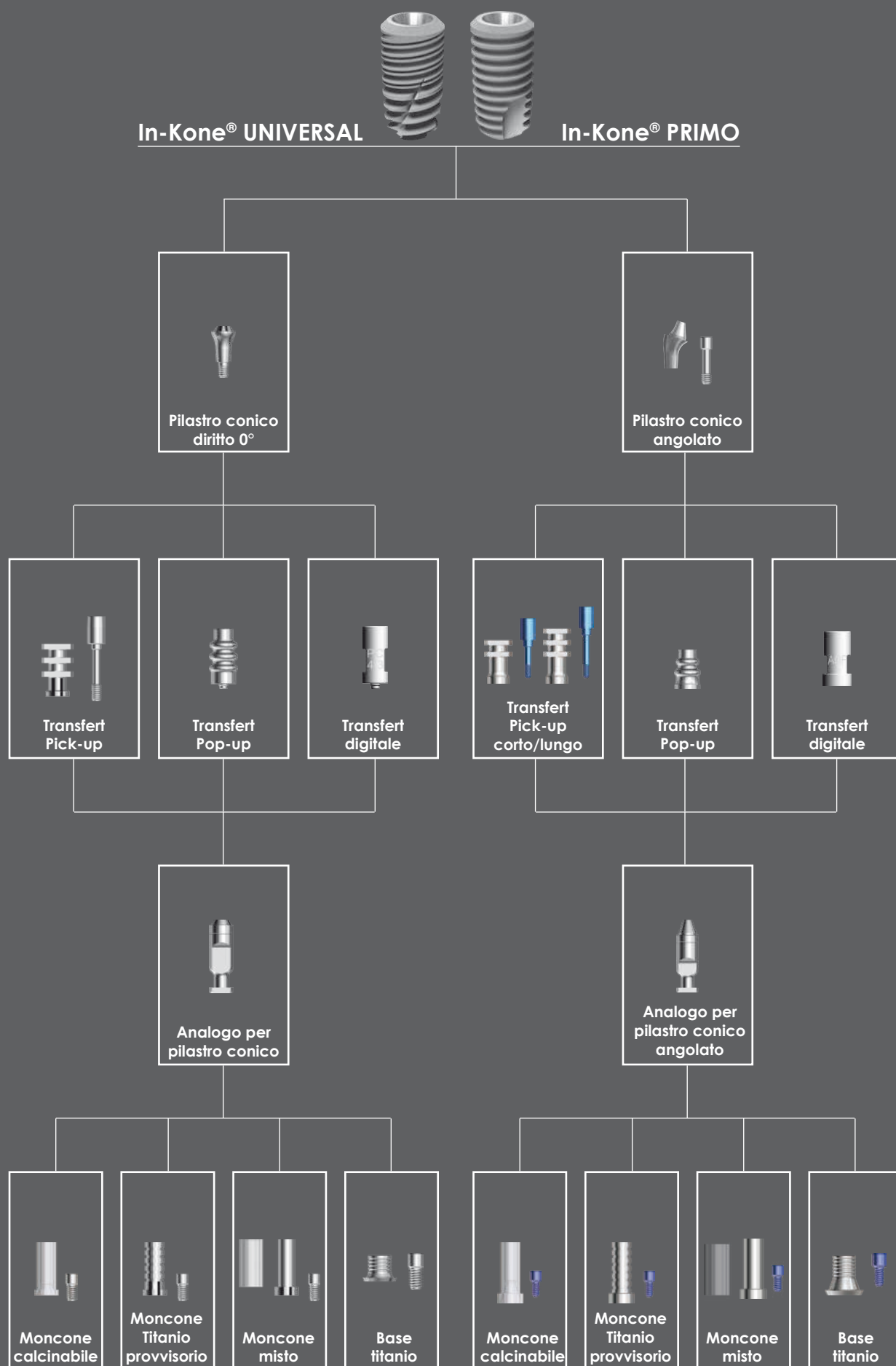

Pilastri conici dritti 0°

I pilastri conici dritti sono indicati per i ponti avvitati e per le protesi mobili su barre. Il pilastro può essere posizionato durante la prima fase protesica e la presa d'impronta viene effettuata direttamente su questo grazie ai transfert d'impronta Pick-up, Pop-up o digitali.

È disponibile una cappetta di copertura per proteggere il pilastro durante la realizzazione del ponte da parte del protesista. Nel carico immediato, si consiglia di utilizzare cappette di copertura di 6 mm.

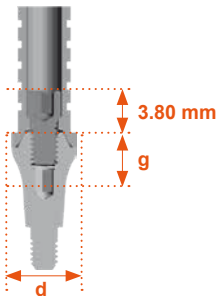

Coppia di serraggio 20 N.cm

	Altezza parodontale (g)	Diametro dell'asse (d)
		Ø 4.3 mm
 Coppia di serraggio : 20 N.cm	1.5	DPCINK4.3H1.5
	2.2	DPCINK4.3H2.2
	3.0	DPCINK4.3H3
	4.0	DPCINK4.3H4
	5.0	DPCINK4.3H5

Cacciaviti



DCM1.2C



DCM1.2




DCM1.2L



Sul pilastro conico, utilizzare unicamente chiave esagonale identificata con una doppia marcatura laser.

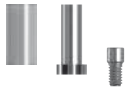

	Diametro dell'asse 4.3 mm
 Transfert Pick-up + vite *	DTIPICVINK4.3
 Vite	DVTIPICINK4.3
 Transfert Pop-up + vite*	DTIPOPINK4.3
 Analogo	DAIINK4.3N
 Capetta di copertura molto alta 8mm**	DCCVINK4.3H8
 Capetta di copertura alta 6mm **	DCCVINK4.3H6
 Capetta di copertura bassa 3mm **	DCCVINK4.3H3
 Moncone titanio provvisorio **	DGTIVINK4.3
 Moncone calcinabile **	DGCIVINK4.3
 Moncone misto **	DGMSGTINK4.3
 Base per pilastro conico diritto + vite **	DEVPC4.3
 Capetta di lucidatura	DCPAOF4.3-4.7
 Vite per protesi	DVPIINK
 Vite di laboratorio	DVPIINKLABH2
	DVPIINKLABH2-8 (per 8)
 Vite guida di laboratorio H12	DVPIINKLABH12
	DVPIINKLABH12-8 (per 8)
 Vite guida di laboratorio H22	DVPILAB4.3H22
	DVPILAB4.3H22-8 (per 8)

* Utilizzare le chiavi DCPOPC e DCPOPC-L

** Utilizzare i cacciaviti DCM1.2C, DCM1.2 o DCM1.2 L



Cacciaviti / Chiavi di avvitamento



DCM1.2C
DCM1.2
DCM1.2L



DCPOPC




DCPOPC-L

Transfert digitale

 Transfert digitale titanio per pilastro conico diritto (PC4.3)	DTNPC4.3
--	----------

Pilastri conici angolati

I pilastri conici angolati sono indicati per i ponti avvitati e per le protesi mobili su barre. I pilastri esistono in versione rotazionale o anti rotazionale. Il pilastro è posizionato durante la prima fase protesica e la presa d'impronta viene effettuata direttamente su questo grazie ai transfert d'impronta Pick-up o Pop-up su pilastri o grazie ai transfert d'impronta digitali.

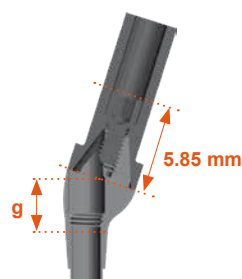

Coppia di serraggio del pilastro : 15 N.cm

	Altezza parodontale (g)	Diametro dell'asse (d)
		Ø 4.7 mm
 Non indicizzato 17°	2.5	DPAOFRVINK-17H2.5
	3.5	DPAOFRVINK-17H3.5
	4.3	DPAOFRVINK-17H4.3
 Non indicizzato 30°	2.5	DPAOFRVINK-30H2.5
	3.5	DPAOFRVINK-30H3.5
	4.3	DPAOFRVINK-30H4.3
 Indicizzato 17°	2.5	DPAOFVINK-17H2.5
	3.5	DPAOFVINK-17H3.5
	4.3	DPAOFVINK-17H4.3
 Indicizzato 30°	2.5	DPAOFVINK-30H2.5
	3.5	DPAOFVINK-30H3.5
	4.3	DPAOFVINK-30H4.3

Cacciaviti



DCM1.2C



DCM1.2



DCM1.2L



Pinza per pilastro conico angolato





DPPAOF

	Riferimento
 Transfert Pick-up corto + vite*	DTCPICAOFV
 Vite per transfert corto*	DVTPICAOF-C
 Transfert Pick-up lungo + vite*	DTLPICAOFV
 Vite per transfert lungo*	DVTPICAOF-L
 Transfert Pop-up*	DTPOPAOF
 Analogo	DAAOFN
 Cappetta di copertura**	DCCAOFV
 Moncone titanio provvisorio**	DGTPAOFV
 Moncone calcinabile**	DGCAOFV
 Moncone misto**	DGMAOFV
 Base per pilastro conico angolato + vite**	DEVPAOF
 Moncone titanio liscio	DGTLAOFV
 Vite per protesi **	DVPAOF
 Cappetta di lucidatura	DCPAOF4.3-4.7
 vite guida di laboratorio**	DVPLABAOFH22 DVPLABAOFH22-8 (per 8)

* Utilizzare le chiavi DCPOPC o DCPOPC-L*

** Utilizzare i cacciaviti DCM1.2C, DCM1.2 o DCM1.2 L

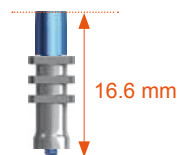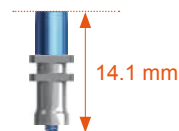

Cacciaviti



DCM1.2C/L



DCPOPC




DCPOPC-L

Transfert digitale

 Transfert digitale titanio per pilastro conico angolato (PAOF)	DTNPAOF
---	---------

Protesi mobile

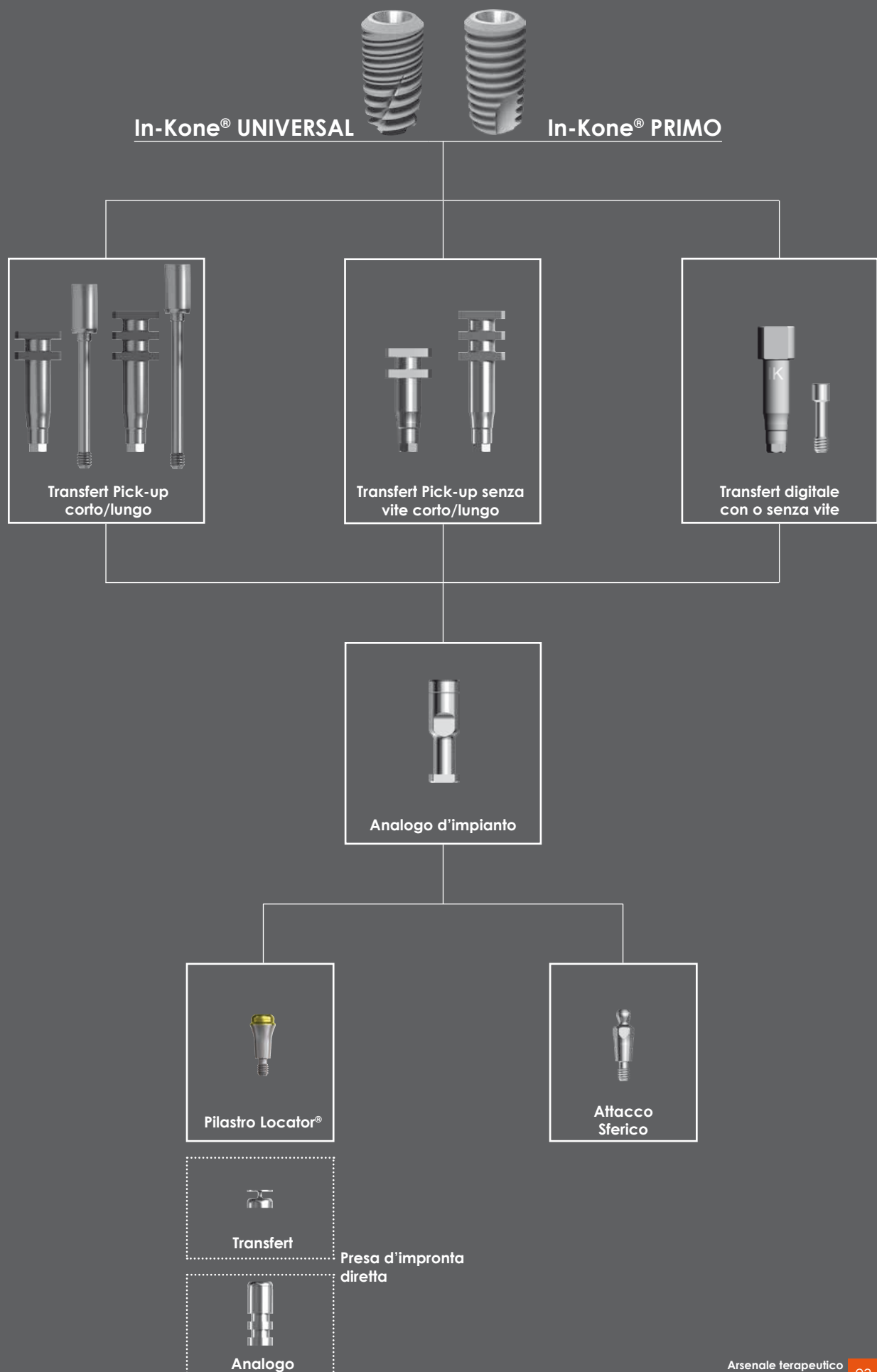


Attacchi sferici

Sono disponibili in due altezze transgengivali, in un'unico diametro di 4 mm e con un diametro della sfera di 2,25 mm (quindi sono compatibili con gli attacchi di varie marche*). Il pilastro è avvitato con l'ausilio del cacciavite esagonale 1.2 mm. La tolleranza massima è di 15° ad impianto, cioè 30° tra 2 impianti.

In caso di sostituzione del moncone, si può utilizzare il cacciavite DCPIMU.

	Altezza parodontale (g)	Base (d) d= 4 mm
	3	DPS22CI4H3
	5	DPS22CI4H5

*elenco di tutte le marche compatibili disponibili su richiesta

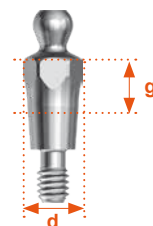

Coppia di serraggio : 20 N.cm

Chiavi di avvitamento / svitamento



DCM1.2



DCPIMU

	DDBPELPSTD055890		usura degli attacchi sferici secondo il tipo di ripresa
	ricambio standard	DDBPININSERTD*	
	ripresa soft	DDBPINSETRSOFT050*	
	ripresa	DDBPINSETR055687*	
			2.26 à 2.23
			2.23 à 2.20
			2.20 à 2.17

Nota: l'inserto è attivato con l'attivatore rif. DDBPCVACT43048



*Dalbo® è un marchio depositato. Componenti fabbricati da CENDRES+METAUX - CE 0510



Pilastri Locator®

La concezione del pilastro Locator® permette la presa d'impronta sui pilastri avvitati. Il laboratorio lavora su copie dell'attacco. Ciò permette di collegare lo spaziatore durante la polimerizzazione della protesi.

L'autoallineamento facilita la presa d'impronta e il posizionamento della protesi anche con impianti che hanno una divergenza fino a 40°.

	Altezza parodontale (g)	Base (d) d= 4 mm
	1.5	DLOCPCIH1.5*
	3.0	DLOCPCIH3*
	4.0	DLOCPCIH4*
	5.0	DLOCPCIH5*



Coppia di serraggio : 20 N.cm

*Locator® è un marchio depositato. Componenti fabbricati da ZEST ANCHORS CE 0473



		Base (d)
		d= 4.0 mm
Divergenza massima di 20°	 Transfert d'impronta	DLOCTransfert* (per 4)
	 Analogo	DLOC4MMANALOG* (per 4)
	 Femmina Locator (contenitore, rondelle di spaziatura e ritenzioni)	DLOCATORPACK* (per 2)
	 Sachetto di 4 inserti neri	DLOCJ0*
	 Sachetto di 4 inserti blu 688 g	DLOCJ1*
	 Sachetto di 4 inserti rosa 1361 g	DLOCJ2*
	 Sachetto di 4 inserti bianchi 2268 g	DLOCJ3*
	 Sachetto di 4 inserti rossi 450 g	DLOCJ4*
	 Sachetto di 4 inserti verdi 1810 g	DLOCJ5*
Divergenza massima di 40°	 Sachetto di 4 inserti arancio 910 g	DLOCJ6*

*Locator® è un marchio depositato.


Componenti fabbricati da ZEST ANCHORS CE 0473



Strumentario protesico

Kit protesico

Questo kit è destinato unicamente agli studi dentistici. Comprende un cacciavite manuale esagonale di 1.2 mm, due estrattori per moncone, una chiave manuale per transfert d'impronta e la chiave dinamometrica.

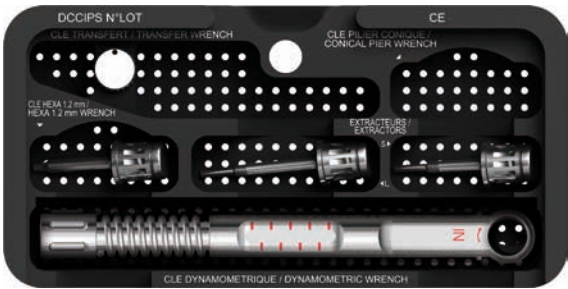

Kit protesico In-Kone® UNIVERSAL completo (DPCIKIT)

	Descrizione	Riferimento
	Chiave dinamometrica 40N.cm	DCDYN-2*
	Chiave manuale extra corta per transfert d'impronta	DCPOPC
	Cacciavite manuale esagonale 1.2 mm standard	DCM1.2
	Estrattore manuale standard per monconi A 0.7 - 1.5 e 3 mm	DEMCI2
	Estrattore manuale lungo per monconi A 0.7 - 1.5 - 3 - 5 e 7 mm	DEMCI2L
	Kit vuoto	DCCIPS

* Chiave fabbricata da Josef Ganter GmbH CE

Cacciaviti opzionali

	Descrizione	Riferimento
	Cacciavite manuale esagonale 1.2 mm corto	DCM1.2C
	Cacciavite manuale esagonale 1.2 mm lungo	DCM1.2L
	Cacciavite esagonale contrangolo corto	DCCA1.2C
	Chiave manuale lunga per transfert d'impronta	DCPOPC-L
	Estrattore manuale extra-lungo per moncone A 0.7-1.5-2.2-3-4-5 e 7 mm	DEMCI2-XL
	Estrattore manuale standard per moncone 2-Ex e base d=5.5mm A 1.5 mm	DEMPCI2-2
	Estrattore manuale lungo per moncone 2-Ex e base d=5.5mm A 1.5-2.2-3-4 mm	DEMPCI2L-2
	Pinza corta di moncone 2-Ex e base d=5.5 mm	DPFMPCIC-2
	Chiavi di 1.2mm media manuale/cricchetto	DCM1.2H

Strumentario specifico per Locator®

La chiave Locator 3 in 1 permette di avvitare gli attacchi, collocare gli inserti e rimuoverli.

*Locator® è un marchio depositato.

Componenti fabbricati da ZEST ANCHORS CE 0473



Chiave 3 in 1

DTLOCAT*

Adattatore manuale per attacco contrangolo

Strumentario che permette di trasformare uno strumentario per contrangolo in manuale.



DADMA (lunghezza 10 mm)

Avvitatore / Chiave per moncone

In esclusiva per Global D, questo strumento permette una posa facile e precisa del moncone in bocca, anche nelle zone di difficile accesso.



DPFMCIC (lunghezza 20 mm)*

DPFMCIL (lunghezza 30 mm)*

* Lunghezza totale

Esttratore per moncone

Utilizzabile in laboratorio o nello studio dentistico, permette di estrarre, al bisogno, il moncone in posa, senza esercitare movimenti di torsione o di flessione sull'assemblaggio.



DEMCI2 (lunghezza 26 mm)*

DEMCI2-L (lunghezza 31 mm)*

DEMCI2-XL (lunghezza 39 mm)*

* Lunghezza totale

DEMPCI2-2 (lunghezza 24 mm)*

DEMPCI2L-2 (lunghezza 29 mm)*

* Lunghezza totale dello strumento

Kit monconi di prova

Il kit di monconi di prova in titanio si compone di monconi con inclinazioni di 0°, 7°, 15° e 23° e un'altezza parodontale di 3 mm. Questi monconi di prova devono essere sterilizzati prima dell'utilizzo in bocca. Possono anche servire al laboratorio come modello per convalidare l'ordine.



Kit di 4 monconi Ø 4 mm
(1 di ogni tipo) DAFCI4-4

Kit di 8 monconi Ø 4 mm
(2 di ogni tipo) DAFCI4-8

Viti di laboratorio (vendute per 8)

Per l'utilizzo esclusivo in laboratorio, esistono delle viti guida più lunghe e delle viti di laboratorio per la tecnica diretta, su pilastro conico diritto e/o angolato.



DVPLABCIH2-8



DVPLABCIH12-8

* Immagine delle viti su impianto.

Manico per molare

Il manico per molare è l'elemento indispensabile del laboratorio e del dentista per ritoccare con precisione i monconi.



AMP

Vite per protesi

Questa vite è disponibile da sola se è necessario un cambio di vite. È universale per la connessione diretta.




DVPCI

La gamma protesica

Impianto 3.0

Indicazioni

L'Impianto 3.0 è un impianto dentale di diametro 3.0mm indicato al restauro degli **spazi ridotti del settore incisivo**.

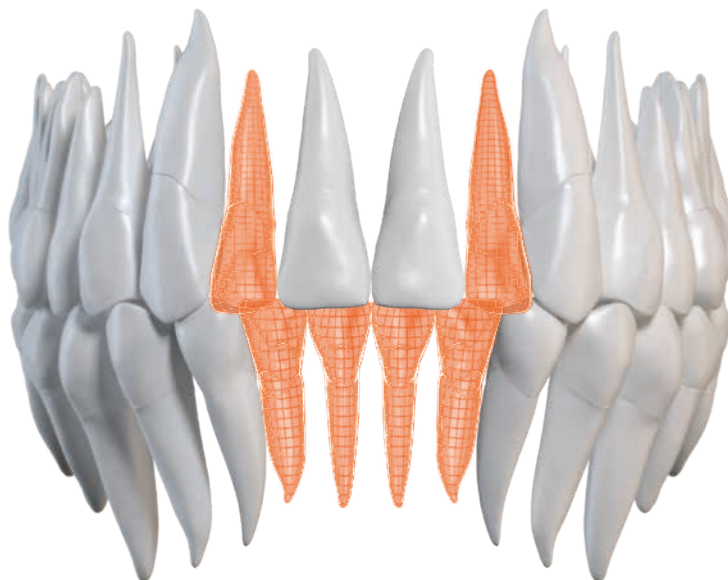

L'Impianto 3.0 ha come indicazioni gli incisivi laterali mascellari e gli incisivi mandibolari. In caso di protesi multipla per gli incisivi mandibolari, avere cura di sostituire ogni dente con un impianto e evitare i ponti.

Controindicazioni

- Solite a tutti i trattamenti implantari
- Utilizzo in impianti provvisori
- Canini, premolari e molari
- Stabilizzazione di protesi aggiunta
- Utilizzo di diversi impianti per sostituire un dente

Concept


L'Impianto 3.0 è dotato di un sistema di blocco che consente di fissare i componenti protesici in bocca **senza vite passante**. Le parti protesiche sono bloccate con effetto morse grazie all'attivatore. Se bisogno, possono essere disattivate con l'aiuto dell'estrattore progettato per questo.

Vero e proprio complemento dell'arsenale terapeutico, l'impianto 3.0 è stato progettato nello stesso stato d'animo degli impianti esistenti, cioè per contribuire alla conservazione del capitale tissutale perimplantare.



Rimozione del moncone :
principio dell'estrattore

Utilizzabile sia nello studio dentistico che in laboratorio, l'estrattore permette di rimuovere, se necessario, il moncone, senza esercitare movimento di torsione o di flessione sull'assemblaggio. È sufficiente svitare l'estrattore dal moncone per estrarlo.

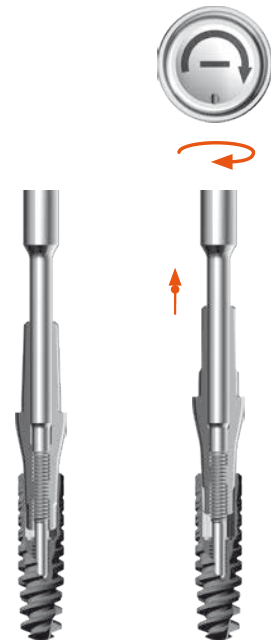

Cacciaviti protesici	
Estrattore	Attivatore
	
	
DEMTZ	DAMTZ

Gamma dei componenti

Disegno del profilo parodontale

La vite di guarigione è un elemento essenziale della fase di restauro del sistema implantare 3.0 perché prepara l'alloggiamento protesico conformemente al componente definitivo (diametro 3.4 mm). La vite di guarigione consente di **facilitare l'inserimento** dell'elemento protesico.

	Riferimento	Descrizione
	DVCITZ3.4H2	Vite di guarigione 3.0 Ø3.4 Altezza 2 mm
	DVCITZ3.4H4	Vite di guarigione 3.0 Ø3.4 Altezza 4 mm
	DVCITZ3.4H6	Vite di guarigione 3.0 Ø3.4 Altezza 6 mm



Coppia di serraggio :
manuale o 10 N.cm max.




Presenza d'impronta diretta su impianto

	Descrizione	Riferimento
	Transfert d'impronta Pick-up senza vite	DTDCPICTZ
	Analogo d'impianto	DATZ

2 tecniche d'impronta diretta su impianto vengono proposte per trasmettere precisamente al laboratorio il profilo di emergenza e il bordo gengivale.

Personalizzazione del transfert direttamente in bocca

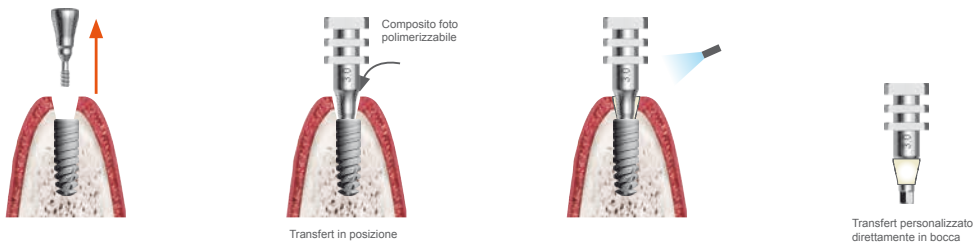

Il transfert **Pick-up** senza vite si posiziona direttamente in bocca con una leggera pressione manuale senza strumentario.

Il **buco di passaggio** della vite del transfert d'impronta può essere riempito con della cera o cotone prima di prendere l'impronta.

Monconi per protesi provvisorie


I monconi per protesi provvisorie sono utilizzati solo per protesi unitarie o multiple non solidarizzate (uno impianto per dente).
Coppia di attivazione 15 N.cm (massimo).

	Riferimento	Altezza parodontale (g)
	DFMPZ3.4H2	2 mm
	DFMPZ3.4H4	4 mm



Profilo di emergenza diametro 3.4 mm

I monconi degli impianti 3.0 sono stati disegnati in modo da garantire l'emergenza del futuro dente. La spalla di 4/10° mm permette di ricevere lo spessore ceramo-metallico della protesi con una **regolazione precisa del limite cervicale della corona**. I monconi esistono in versioni diritta e angolata (7° e 15°). Sono indicati per restauri unitari o multipli cementati (un impianto = un dente).

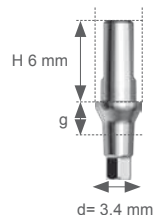

Coppia d'attivazione : 15 N.cm

Monconi dritti

I monconi dritti sono indicati **per i restauri unitari o multipli cementati**. La loro indicazione principale si trova nel **settore incisivo mandibolare**. La lamina di metallo a livello della corona lascia la possibilità di apportare delle modifiche minori senza alterare la resistenza meccanica a questo livello. La parte coronaria misura 6 mm ed è ritoccabile su 2 mm.

	Altezza parodontale (g)	Riferimento
	1 mm	DFMTZ3.4H1-00
	2 mm	DFMTZ3.4H2-00
	4 mm	DFMTZ3.4H4-00
	6 mm	DFMTZ3.4H6-00

Monconi angolati 7° e 15°

I monconi angolati sono indicati per i **restauri unitari o multipli cementati**. La loro indicazione principale si trova nel **settore incisivo laterale mascellare**. La lamina di metallo a livello della corona lascia la possibilità di apportare delle modifiche minori senza alterare la resistenza meccanica a questo livello. La parte coronaria misura 7 mm ed è ritoccabile su 3 mm.

Coppia di attivazione : 15 N.cm

Angolati 7°		
	Altezza parodontale	Riferimento
	2 mm	DFMTZ3.4H2-07
	4 mm	DFMTZ3.4H4-07
	6 mm	DFMTZ3.4H6-07


Angolati 15°		
	Altezza parodontale	Riferimento
	2 mm	DFMTZ3.4H2-15
	4 mm	DFMTZ3.4H4-15
	6 mm	DFMTZ3.4H6-15

La gamma protesica *twinkon*[®] 4

Indicazioni

Zona mandibolare posteriore

Il *twinkon*[®] 4 è specificamente indicato per gli inserimenti plurimi nella zona mandibolare posteriore in caso di **atrofia ossea severa**.

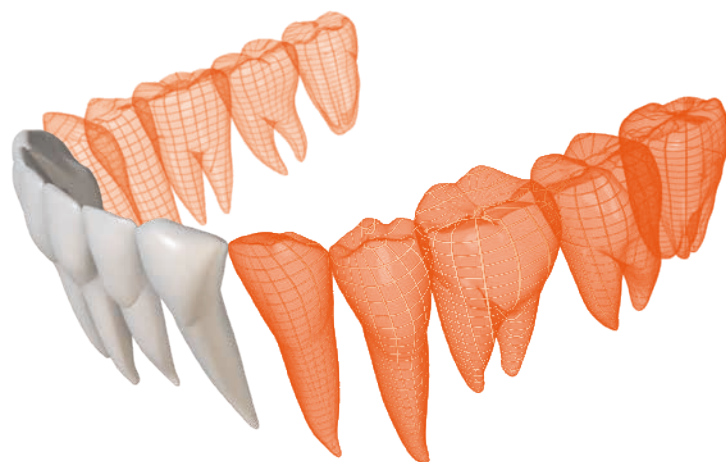

Pilastro conico
di altezza
2.4 mm & 3.4 mm

Ø 3.5 mm

1.5 mm

Ø 2.7 mm

Principi generali

Posizionamento verticale dell'impianto

Idealmente, la spalla dell'impianto dovrà trovarsi in posizione leggermente subcrestale per permettere l'**incastonatura ossea**.



Adeguamento al corridoio protesico

Grazie al colletto tras mucoso sovrastato dalla connessione conica esterna, il *twinkor*® 4 **esige un posizionamento perfettamente adeguato al corridoio protesico**.



Pilastro conico diritto avvitato

Il pilastro conico è incastonato con frizione sul cono esterno e avvitato nell'impianto con l'aiuto della vite di attacco protesico. Questo montaggio gode delle caratteristiche delle connessioni cono su cono.

Il pilastro conico esiste con due diametri. Per il diametro 4.3mm, è disponibile con altezza 2.9mm; e per il diametro 5.4mm, ci sono due altezze 2.4 e 3.4mm. La vite di attacco è serrata con una coppia di 20 N.cm. Quest'ultima è avvitata con il cacciavite manuale esagonale 1.2mm.



Profilo di emergenza diametro 4.3 mm e 5.4 mm

I pilastri conici del sistema *twinkor*® 4 sono stati disegnati per ottenere l'emergenza progressiva della protesi. La spalla di 5/10° è sufficientemente larga per favorire la passività dell'armatura del ponte.



Spazio interimpiantoare specifico

Dato che si utilizza pilastri conici di diametro 5.4mm, è raccomandato uno spazio minimo interimpiantoare di centro a centro di 7.5mm.



Gamma dei componenti

Cappetta di copertura e viti di guarigione

🔄 Coppia di serraggio: serraggio manuale o 10N.cm massimo

	Descrizione	Riferimento
	Cappetta di copertura per impianto twinKon®	DCCTWK*
	Vite di guarigione twinKon® Ø 5 mm, A = 2.6 mm	DVCITWK5H2.6**
	Vite di guarigione twinKon® Ø 5 mm, A = 4 mm	DVCITWK5H4**

(*) inclusa nel packaging dell'impianto twinKon® 4

(**) nuovi design disponibili dal quarto trimestre 2020

Pilastri conici Ø5.4mm e componenti protesici

	Descrizione	Riferimento	Coppia di serraggio
	Pilastro conico twinKon® Ø 5.4 - Altezza 2.4 mm	DPCCEH1	
	Pilastro conico twinKon® Ø 5.4 - Altezza 3.4 mm	DPCCEH2	
	Transfert Pick-up corto per pilastro conico	DTCIPICVCE	🔄 Serraggio manuale
	Transfert Pick-up lungo per pilastro conico	DTIPICVCE	🔄 Serraggio manuale
	Transfert Pick-up extra lungo per pilastro conico	DTLIPICVCE	🔄 Serraggio manuale
	Cappetta di copertura per pilastro conico	DCCVCE	🔄 Serraggio a 15N.cm
	Analogo per pilastro conico	DAICE	
	Moncone calcinabile per pilastro conico	DGCIVCE	🔄 Serraggio a 20N.cm
	Moncone titanio	DGTIVCE	🔄 Serraggio a 20N.cm
	Moncone misto	DGMIVCE	🔄 Serraggio a 20N.cm
	Vite per protesi	DVPICE	🔄 Serraggio a 20N.cm


Pilastri conici Ø4.3mm e componenti protesici

	Descrizione	Riferimento	Coppia di serraggio
	Pilastro conico <i>twinkon</i> ® Ø 4.3 mm A 2.9 mm	DPCTWK4.3	
	Cappetta di copertura per pilastro conico <i>twinkon</i> ® Ø 4.3 mm A 3 mm	DCCVTWK4.3	 Serraggio manuale
	Transfert Pick-Up per pilastro conico Ø 4.3 mm + vite	DTIPICVTWK4.3	 Serraggio manuale
	Transfert Pop-Up per pilastro conico Ø 4.3 mm	DTILOPTWK4.3	 Serraggio manuale
	Transfert numerico titanio per pilastro conico Ø 4.3 mm	DTNPCTWK4.3	 Serraggio manuale
	Analogo di pilastro conico Ø 4.3mm numerico	DAITWK4.3N	
	Moncone titanio	DGTIVTWK4.3	 Serraggio a 20N.cm
	Moncone calcinabile	DGCIVTWK4.3	 Serraggio a 20N.cm
	Moncone misto	DGMIVTWK4.3	 Serraggio a 20N.cm
	Base titanio	DEVPCTWK4.3	 Serraggio a 20N.cm

Kit protesico

Questo kit è destinato unicamente agli studi dentistici. Comprende un cacciavite manuale esagonale di 1.2 mm e uno di 0.9mm, un'estrattore per pilastro conico Ø5.4mm, un'estrattore standard per i monconi e per pilastri Ø4.3mm e la chiave dinamometrica.

Kit protesico *twinkon*® - Rif. DPCEKIT
 Kit protesico *twinkon*® vuoto - Rif. DCCEPS

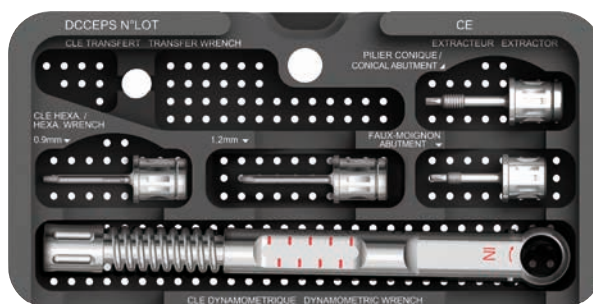

	Descrizione	Riferimento
	Estrattore di moncone <i>twinkon</i> ® medio e pilastro conico d=4.3 mm	DEMCE
	Estrattore di pilastro conico <i>twinkon</i> ® d=5.4 mm	DPEPCCE
	Cacciavite manuale <i>twinkon</i> ® standard esagonale d=0.9 mm	DCM0.9
	Cacciavite manuale standard esagonale	DCM1.2
	Attivatore manuale di pilastro conico <i>twinkon</i> ® d=4.3 mm (opzionale)	DAMPCTWK4.3

Informazioni tecniche



La lega di titanio medico TA6V ELI (Extra Low Impurity), materiale di scelta per l'implantologia dentale

TA6V ELI, una lega biocompatibile




Il **TA6V ELI** è un materiale conforme alle normative internazionali **ISO 5832-3**. Il TA6V ELI unisce debole densità, eccellente biocompatibilità, debole modulo d'elasticità e resistenza meccanica elevata, che lo rendono particolarmente indicato per la fabbricazione di impianti dentali.

Trattamento di superficie osteoconduttrice SA²




Grazie al trattamento SA² realizzato sulla parte endo-ossea degli impianti, lo stato di superficie del TA6V ELI presenta un doppio livello di rugosità.

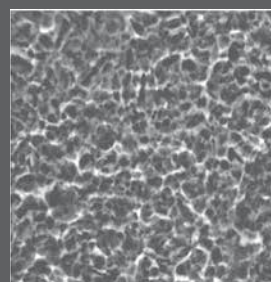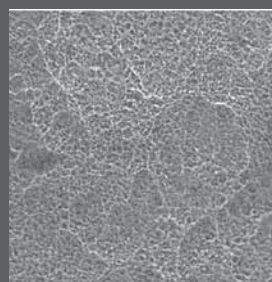


Osso dopo 3 settimane dal posizionamento su Beagle

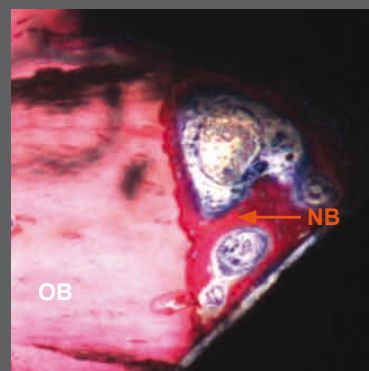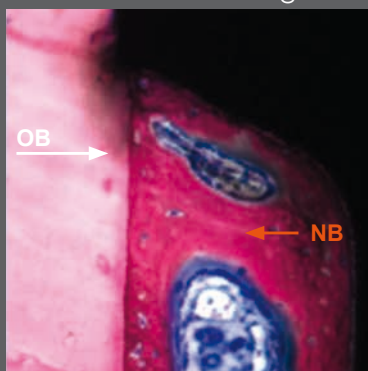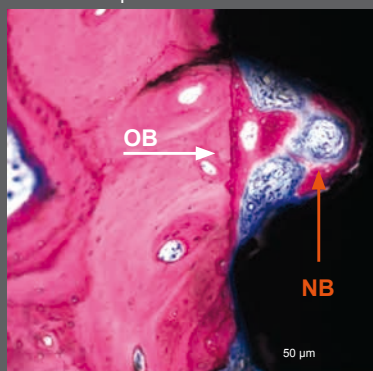

Osso dopo 12 settimane dal posizionamento su Beagle

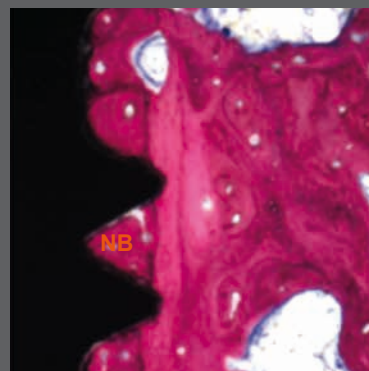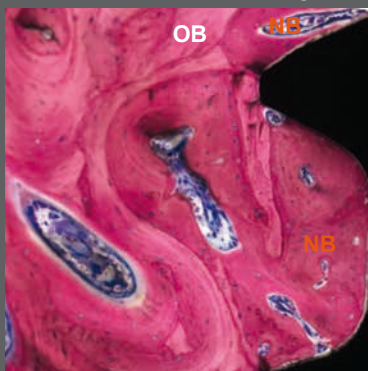
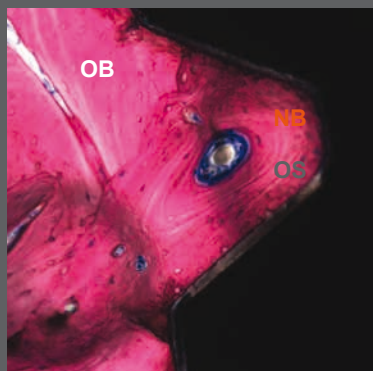


Studio sul cane «beagle» realizzato dai Dott. Bolle C 1-2, Exbrayat P 2, Gristich K 1-2 e Grosgeat B 1-2 in collaborazione con il Dott. D. Fau 3
(Metodo di analisi : istologia, osso non decalcificato, cutting-grinding)

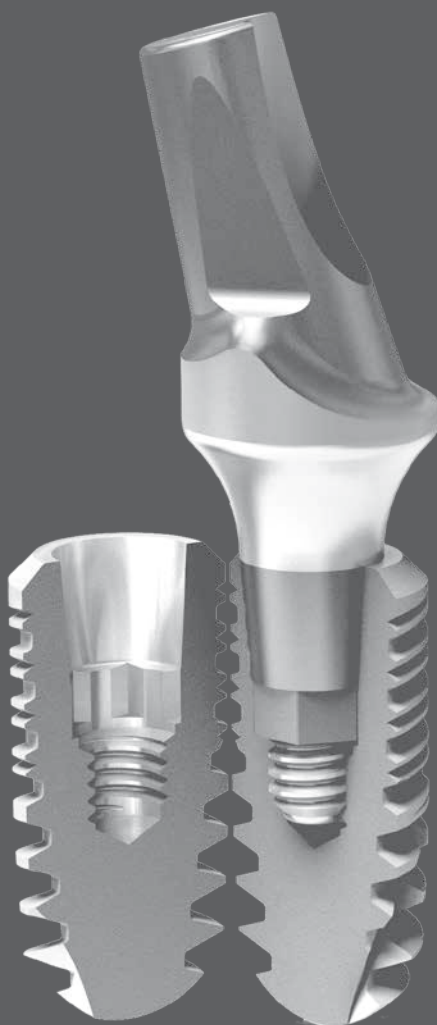

TA6V ELI, una lega di lavorazione industriale di alta precisione.


Il titanio fa parte dei metalli complessi da lavorare. La durata del TA6V ELI, comparata a quella di un titanio grado IV più «elastico», facilita il distacco del materiale al momento del taglio. Utilizzato con gli attrezzi concepiti su misura per Global D, permette una precisione di lavorazione ottima. Questa condizione indispensabile risponde alle esigenze biomeccaniche delle connessioni implantari di tipo cono di sfregamento utilizzate in modo particolare per gli impianti delle gamme In-Kone® UNIVERSAL, In-Kone® PRIMO, Impianto 3.0 e *twinkon*® 4.

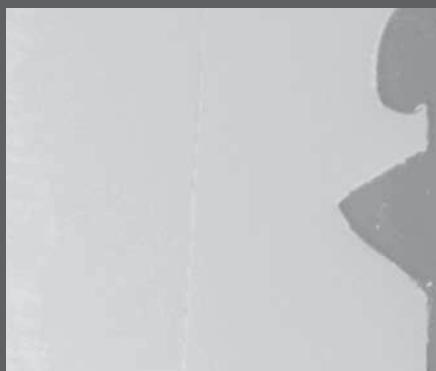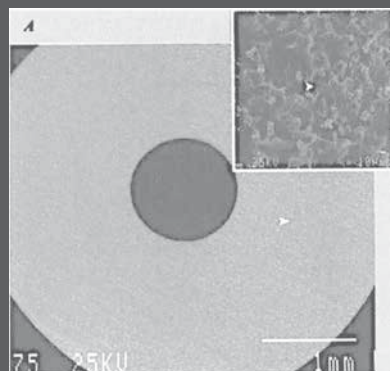

La connessione protesica al centro del dispositivo impiantabile

Risultati meccanici

Da un punto di vista tecnico, la resistenza meccanica e la chiusura dell'interfaccia sono intimamente legate alla precisione di **accoppiamento** tra le parti maschio e femmina così come il controllo degli **stati di superficie** dell'uno e dell'altro.

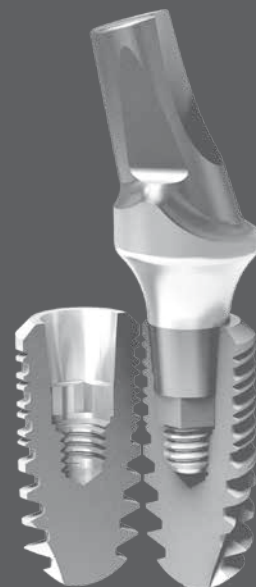

Competenza industriale e dispositivi medici

Concezione, test meccanici, convalida clinica, fabbricazione, controllo, registrazione, tracciabilità, marchio CE, stoccaggio, disponibilità, seguito da immissione in commercio,...

Global D beneficia di un programma tecnico esclusivamente concepito e personalizzato per la fabbricazione d'impianti dentali.

I nostri team di tecnici qualificati sono formati per la lavorazione di dispositivi medici. La padronanza e la precisione delle condizioni di taglio permettono di produrre degli stati di superficie al livello della connessione implantare.

Le connessioni sono sottoposte a controllo severo continuo direttamente sulla catena di produzione. I lotti sono in seguito inviati al servizio di controllo che convalida a turno l'insieme delle parti critiche. Questo ultimo dispone di un programma tecnico high-tech che permette di lavorare con una precisione dell'ordine di ± 5 micron al livello della connessione (lo spessore di un capello al di circa 70 micron in media). Ogni controllo è registrato e conservato per tutta la durata di vita del prodotto.



Global D, partner del vostro successo

In-Kone[®], connessione conica

Ideatori appassionati


Un team tecnico sperimentato

Macchine industriali dedicate

Assemblaggio testato

Componenti controllati

Tracciabilità

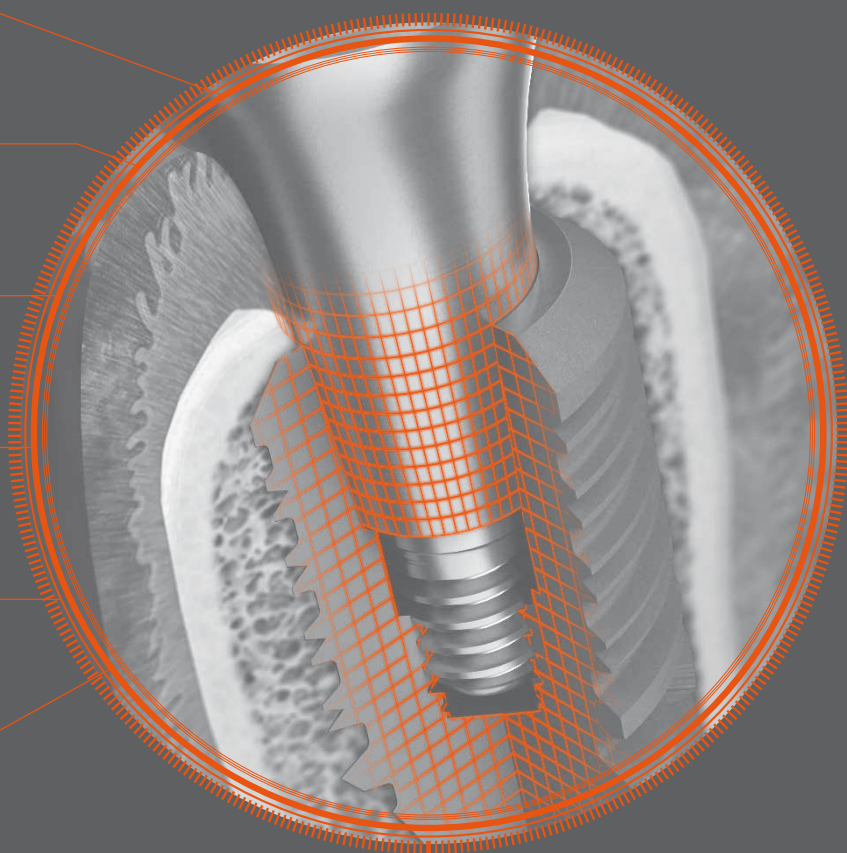

Riferimenti dei prodotti

Protesi In-Kone®

Viti di guarigione

DVCICI4H1.5	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 4 mm A 1.5 mm
DVCICI4H2.2	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 4 mm A 2.2 mm
DVCICI4H3	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 4 mm A 3 mm
DVCICI4H4	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 4 mm A 4 mm
DVCICI4H5	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 4 mm A 5 mm
DVCICI4H7	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 4 mm A 7 mm
DVCICI5H1.5	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 5 mm A 1.5 mm
DVCICI5H2.2	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 5 mm A 2.2 mm
DVCICI5H3	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 5 mm A 3 mm
DVCICI5H4	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 5 mm A 4 mm
DVCICI5H5	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 5 mm A 5 mm
DVCICI5H7	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 5 mm A 7 mm
DVCICI6.5H1.5	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 6.5 mm A 1.5 mm
DVCICI6.5H2.2	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 6.5 mm A 2.2 mm
DVCICI6.5H3	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 6.5 mm A 3 mm
DVCICI6.5H4	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 6.5 mm A 4 mm
DVCICI6.5H5	Vite di guarigione In-Kone® piatta Ø 6.5 mm A 5 mm
DVCIHCI4H1.5	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 4 mm A 1.5 mm
DVCIHCI4H2.2	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 4 mm A 2.2 mm
DVCIHCI4H3	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 4 mm A 3 mm
DVCIHCI4H4	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 4 mm A 4 mm
DVCIHCI4H5	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 4 mm A 5 mm
DVCIHCI4H7	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 4 mm A 7 mm
DVCIHCI5H1.5	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 5 mm A 1.5 mm
DVCIHCI5H2.2	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 5 mm A 2.2 mm
DVCIHCI5H3	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 5 mm A 3 mm
DVCIHCI5H4	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 5 mm A 4 mm
DVCIHCI5H5	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 5 mm A 5 mm
DVCIHCI5H7	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 5 mm A 7 mm
DVCIHCI6.5H1.5	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 6.5 mm A 1.5 mm
DVCIHCI6.5H2.2	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 6.5 mm A 2.2 mm
DVCIHCI6.5H3	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 6.5 mm A 3 mm
DVCIHCI6.5H4	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 6.5 mm A 4 mm
DVCIHCI6.5H5	Vite di guarigione In-Kone® alta Ø 6.5 mm A 5 mm

Transfert e analoghi

DTCPICVCI	Transfert PICK-UP corto + vite
DTLPICVCI	Transfert Pick-Up lungo + vite
DTDCPICCI	Transfert Pick-Up corto, diretto
DTDLPICCI	Transfert Pick-Up lungo, diretto
DTNVINK	Transfert digitale titanio per impianto In-Kone avvitato + vite
DTNDINK	Transfert digitale titanio per impianto In-Kone®, monoblocco
DACI	Analogo d'impianto

Monconi provvisori

DFMPVCIH1.5	Moncone provvisorio indicizzato A 1.5 mm + vite
DFMPVCIH3	Moncone provvisorio indicizzato A 3 mm + vite

Monconi standard

DFMLTDVCI4H1.5	Moncone diritto indicizzato Ø 4 A 1.5 mm
DFMLTDVCI4H2.2	Moncone diritto indicizzato Ø 4 A 2.2 mm
DFMLTDVCI4H3	Moncone diritto indicizzato Ø 4 A 3 mm
DFMLTDVCI4H4	Moncone diritto indicizzato Ø 4 A 4 mm
DFMLTDVCI4H5	Moncone diritto indicizzato Ø 4 A 5 mm
DFMLTDVCI4H7	Moncone diritto indicizzato Ø 4 A 7 mm
DFMLTDVCI5H1.5	Moncone diritto indicizzato Ø 5 A 1.5 mm
DFMLTDVCI5H2.2	Moncone diritto indicizzato Ø 5 A 2.2 mm
DFMLTDVCI5H3	Moncone diritto indicizzato Ø 5 A 3 mm
DFMLTDVCI5H4	Moncone diritto indicizzato Ø 5 A 4 mm
DFMLTDVCI5H5	Moncone diritto indicizzato Ø 5 A 5 mm
DFMLTDVCI5H7	Moncone diritto indicizzato Ø 5 A 7 mm
DFMLTDVCI6H2.2	Moncone diritto indicizzato Ø 6 A 2.2 mm
DFMLTDVCI6H4	Moncone diritto indicizzato Ø 6 A 4 mm
DFMLTDVCI6.5H1.5	Moncone diritto indicizzato Ø 6.5 A 1.5 mm
DFMLTDVCI6.5H3	Moncone diritto indicizzato Ø 6.5 A 3 mm
DFMLTDVCI6.5H5	Moncone diritto indicizzato Ø 6.5 A 5 mm

DFMLTAVCI4-7H1.5	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 4 A 1.5 mm
DFMLTAVCI4-7H2.2	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 4 A 2.2 mm
DFMLTAVCI4-7H3	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 4 A 3 mm
DFMLTDVCI4-7H4	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 4 A 4 mm
DFMLTAVCI4-7H5	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 4 A 5 mm
DFMLTAVCI5-7H1.5	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 5 A 1.5 mm
DFMLTAVCI5-7H2.2	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 5 A 2.2 mm
DFMLTAVCI5-7H3	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 5 A 3 mm
DFMLTDVCI5-7H4	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 5 A 4 mm
DFMLTAVCI5-7H5	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 5 A 5 mm
DFMLTAVCI5-7H7	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 5 A 7 mm
DFMLTAVCI6.5-7H1.5	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 6.5 A 1.5 mm
DFMLTAVCI6.5-7H2.2	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 6.5 A 2.2 mm
DFMLTAVCI6.5-7H3	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 6.5 A 3 mm
DFMLTDVCI6.5-7H4	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 6.5 A 4 mm
DFMLTDVCI6.5-7H5	Moncone angolato 7° indicizzato Ø 6.5 A 5 mm
DFMLTAVCI4-15H1.5	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 4 A 1.5 mm
DFMLTAVCI4-15H2.2	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 4 A 2.2 mm
DFMLTAVCI4-15H3	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 4 A 3 mm
DFMLTDVCI4-15H4	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 4 A 4 mm
DFMLTAVCI4-15H5	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 4 A 5 mm
DFMLTAVCI5-15H1.5	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 5 A 1.5 mm
DFMLTAVCI5-15H2.2	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 5 A 2.2 mm
DFMLTAVCI5-15H3	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 5 A 3 mm
DFMLTDVCI5-15H4	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 5 A 4 mm
DFMLTAVCI5-15H5	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 5 A 5 mm
DFMLTAVCI5-15H7	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 5 A 7 mm
DFMLTAVCI6.5-15H1.5	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 6.5 A 1.5 mm
DFMLTAVCI6.5-15H2.2	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 6.5 A 2.2 mm
DFMLTAVCI6.5-15H3	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 6.5 A 3 mm
DFMLTDVCI6.5-15H4	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 6.5 A 4 mm
DFMLTDVCI6.5-15H5	Moncone angolato 15° indicizzato Ø 6.5 A 5 mm
DFMLTAVCI5-23H1.5	Moncone angolato 23° indicizzato Ø 5 A 1.5 mm
DFMLTAVCI5-23H3	Moncone angolato 23° indicizzato Ø 5 A 3 mm
DFMLTAVCI5-23H5	Moncone angolato 23° indicizzato Ø 5 A 5 mm
DFMLTAVCI5-23H7	Moncone angolato 23° indicizzato Ø 5 A 7 mm
DFMLTAVCI6.5-23H1.5	Moncone angolato 23° indicizzato Ø 6.5 A 1.5 mm
DFMLTAVCI6.5-23H2.2	Moncone angolato 23° indicizzato Ø 6.5 A 2.2 mm
DFMLTAVCI6.5-23H3	Moncone angolato 23° indicizzato Ø 6.5 A 3 mm
DFMLTDVCI6.5-23H4	Moncone angolato 23° indicizzato Ø 6.5 A 4 mm
DFMLTDVCI6.5-23H5	Moncone angolato 23° indicizzato Ø 6.5 A 5 mm

Monconi profilati

DFMPDVINK4H1.5	Moncone profilato 0° indicizzato Ø 4 A 1.5 mm
DFMPDVINK4H2.2	Moncone profilato 0° indicizzato Ø 4 A 2.2 mm
DFMPDVINK4H3	Moncone profilato 0° indicizzato Ø 4 A 3 mm
DFMPDVINK4H4	Moncone profilato 0° indicizzato Ø 4 A 4 mm
DFMPDVINK5H1.5	Moncone profilato 0° indicizzato Ø 5 A 1.5 mm
DFMPDVINK5H2.2	Moncone profilato 0° indicizzato Ø 5 A 2.2 mm
DFMPDVINK5H3	Moncone profilato 0° indicizzato Ø 5 A 3 mm
DFMPDVINK5H4	Moncone profilato 0° indicizzato Ø 5 A 4 mm
DFMPDVINK6.5H1.5	Moncone profilato 0° indicizzato Ø 6.5 A 1.5 mm
DFMPDVINK6.5H2.2	Moncone profilato 0° indicizzato Ø 6.5 A 2.2 mm
DFMPDVINK6.5H3	Moncone profilato 0° indicizzato Ø 6.5 A 3 mm
DFMPDVINK6.5H4	Moncone profilato 0° indicizzato Ø 6.5 A 4 mm
DFMPAVINK4-7H1.5	Moncone profilato 7° indicizzato Ø 4 A 1.5 mm
DFMPAVINK4-7H2.2	Moncone profilato 7° indicizzato Ø 4 A 2.2 mm
DFMPAVINK4-7H3	Moncone profilato 7° indicizzato Ø 4 A 3 mm
DFMPAVINK4-7H4	Moncone profilato 7° indicizzato Ø 4 A 4 mm
DFMPAVINK5-7H1.5	Moncone profilato 7° indicizzato Ø 5 A 1.5 mm
DFMPAVINK5-7H2.2	Moncone profilato 7° indicizzato Ø 5 A 2.2 mm
DFMPAVINK5-7H3	Moncone profilato 7° indicizzato Ø 5 A 3 mm
DFMPAVINK5-7H4	Moncone profilato 7° indicizzato Ø 5 A 4 mm
DFMPAVINK4-15H1.5	Moncone profilato 15° indicizzato Ø 4 A 1.5 mm
DFMPAVINK4-15H2.2	Moncone profilato 15° indicizzato Ø 4 A 2.2 mm
DFMPAVINK4-15H3	Moncone profilato 15° indicizzato Ø 4 A 3 mm
DFMPAVINK4-15H4	Moncone profilato 15° indicizzato Ø 4 A 4 mm
DFMPAVINK5-15H1.5	Moncone profilato 15° indicizzato Ø 5 A 1.5 mm
DFMPAVINK5-15H2.2	Moncone profilato 15° indicizzato Ø 5 A 2.2 mm
DFMPAVINK5-15H3	Moncone profilato 15° indicizzato Ø 5 A 3 mm
DFMPAVINK5-15H4	Moncone profilato 15° indicizzato Ø 5 A 4 mm
DFMPAVINK6.5-15H1.5	Moncone profilato 15° indicizzato Ø 6.5 A 1.5 mm
DFMPAVINK6.5-15H2.2	Moncone profilato 15° indicizzato Ø 6.5 A 2.2 mm
DFMPAVINK6.5-15H3	Moncone profilato 15° indicizzato Ø 6.5 A 3 mm
DFMPAVINK6.5-15H4	Moncone profilato 15° indicizzato Ø 6.5 A 4 mm

Monconi corti

DFMCRVCI4H1.5	Moncone corto non indicizzato Ø 4 A 1.5 mm
DFMCRVCI4H3	Moncone corto non indicizzato Ø 4 A 3 mm
DFMCRVCI4H5	Moncone corto non indicizzato Ø 4 A 5 mm
DFMCRVCI5H1.5	Moncone corto non indicizzato Ø 5 A 1.5 mm
DFMCRVCI5H3	Moncone corto non indicizzato Ø 5 A 3 mm
DFMCRVCI5H5	Moncone corto non indicizzato Ø 5 A 5 mm
DFMCARVCI4-7H1.5	Moncone corto angolato 7° non indicizzato Ø 4 A 1.5 mm
DFMCARVCI4-7H3	Moncone corto angolato 7° non indicizzato Ø 4 A 3 mm
DFMCARVCI4-7H5	Moncone corto angolato 7° non indicizzato Ø 4 A 5 mm
DFMCARVCI5-7H1.5	Moncone corto angolato 7° non indicizzato Ø 5 A 1.5 mm
DFMCARVCI5-7H3	Moncone corto angolato 7° non indicizzato Ø 5 A 3 mm
DFMCARVCI5-7H5	Moncone corto angolato 7° non indicizzato Ø 5 A 5 mm
DFMCARVCI4-15H1.5	Moncone corto angolato 15° non indicizzato Ø 4 A 1.5 mm
DFMCARVCI4-15H3	Moncone corto angolato 15° non indicizzato Ø 4 A 3 mm
DFMCARVCI4-15H5	Moncone corto angolato 15° non indicizzato Ø 4 A 5 mm
DFMCARVCI5-15H1.5	Moncone corto Ø5 angolato 15° non indicizzato Ø 5 A 1.5 mm
DFMCARVCI5-15H3	Moncone corto Ø5 angolato 15° non indicizzato Ø 5 A 3 mm
DFMCARVCI5-15H5	Moncone corto Ø5 angolato 15° non indicizzato Ø 5 A 5 mm
DCCFMCCI4H4	Cappetta di protezione Ø 4 mm A 4 mm
DCCFMCCI4H6	Cappetta di protezione Ø 4 mm A 6 mm
DCPFMCCI4	Cappuccio per impronta d= 4 mm
DCCFMCCI5	Cappetta di protezione Ø 5 mm A 4 mm
DCPFMCCI5	Cappuccio per impronta d= 5 mm
DAFMCH6	Analogo per moncone Ø 4 mm A 6
DAFMCCI	Analogo per moncone Ø 5 mm

Vari

DEVCI3.8H2	Base titanio Ø 3.8 mm A 2 mm
DEVCI3.8H3	Base titanio Ø 3.8 mm A 3 mm
DEVCI3.8H4	Base titanio Ø 3.8 mm A 4 mm
DEVCI5.5H1.5	Base titanio Ø 5.5 mm A 1.5 mm
DEVCI5.5H2.2	Base titanio Ø 5.5 mm A 2.2 mm
DEVCI5.5H3	Base titanio Ø 5.5 mm A 3 mm
DEVCI5.5H4	Base titanio Ø 5.5 mm A 4 mm
DLABPMVINK	Prefresato In-Kone S3DEL

Pilastri conici diritti e componenti secondari

DPCINK4.3H1.5	Pilastro conico diritto 0° A 1.5 mm
DPCINK4.3H2.2	Pilastro conico diritto 0° A 2.2 mm
DPCINK4.3H3	Pilastro conico diritto 0° A 3 mm
DPCINK4.3H4	Pilastro conico diritto 0° A 4 mm
DPCINK4.3H5	Pilastro conico diritto 0° A 5 mm
DCCVINK4.3H3	Cappetta di copertura per pilastro conico 0° A 3 mm
DCCVINK4.3H6	Cappetta di copertura per pilastro conico 0° A 6 mm
DCCVINK4.3H8	Cappetta di copertura per pilastro conico 0° H 8 mm
DTIPICVINK4.3	Transfert Pick-up per pilastro conico 0° + vite
DTIPOPINK4.3	Transfert Pop-up per pilastro conico 0°
DAIINK4.3N	Analogo per pilastro conico 0°
DGTIVINK4.3	Moncone titanio provvisorio per pilastro conico 0° + vite
DGCIVINK4.3	Moncone calcinabile per pilastro conico 0° + vite
DGMSGTINK4.3	Moncone misto per pilastro conico 0° + vite
DCPAOF4.3-4.7	Capetta di lucidatura reversibile
DEVPC4.3	Base per pilastro conico 0° + vite

Pilastri conici angolati e componenti secondari

DPAOFRVINK-17H2.5	Pilastro conico angolato 17° non indicizzato A 2.5 mm
DPAOFRVINK-17H3.5	Pilastro conico angolato 17° non indicizzato A 3.5 mm
DPAOFRVINK-17H4.3	Pilastro conico angolato 17° non indicizzato A 4.3 mm
DPAOFRVINK-30H2.5	Pilastro conico angolato 30° non indicizzato A 2.5 mm
DPAOFRVINK-30H3.5	Pilastro conico angolato 30° non indicizzato A 3.5 mm
DPAOFRVINK-30H4.3	Pilastro conico angolato 30° non indicizzato A 4.3 mm
DPAOFVINK-17H2.5	Pilastro conico angolato 17° indicizzato A 2.5 mm
DPAOFVINK-17H3.5	Pilastro conico angolato 17° indicizzato A 3.5 mm
DPAOFVINK-17H4.3	Pilastro conico angolato 17° indicizzato A 4.3 mm
DPAOFVINK-30H2.5	Pilastro conico angolato 30° indicizzato A 2.5 mm
DPAOFVINK-30H3.5	Pilastro conico angolato 30° indicizzato A 3.5 mm
DPAOFVINK-30H4.3	Pilastro conico angolato 30° indicizzato A 4.3 mm
DCCAOFV	Capetta di copertura (6mm) per pilastro conico angolato
DTLPICAOFV	Transfert Pick-up lungo + vite per pilastro conico angolato

DTCPIAOFV	Transfert Pick-up corto + vite per pilastro conico angolato
DTPOPAOF	Transfert Pop-up per pilastro conico angolato
DAAOFN	Analogo per pilastro conico angolato
DGCAOFV	Moncone calcinabile per pilastro conico angolato + vite
DGTLAOFV	Moncone titanio liscio per pilastro conico angolato + vite
DGTPOAOFV	Moncone titanio provvisorio per pilastro conico angolato + vite
DGMAOFV	Moncone misto per pilastro conico angolato
DEVPAOF	Base per pilastro conico angolato + vite
DCPAOF4.3-4.7	Capetta di lucidatura reversibile

Attacchi sferici

DPS22CI4H3	Attacco sferico Ø 2.2 A 3 mm
DPS22CI4H5	Attacco sferico Ø 2.2 A 5 mm
DDBPELPSTD055890	Pack Dalbo Plus (contenitore + inserto + rondelle di spaziatura)
DDBPINERTSTD	Inserto standard di ricambio
DDBPINERTRSOFT050	Inserto di ripresa soft
DDBPINERTR055687	Inserto di ripresa retentiva

Locator®

DLOCPCIH1.5	Pilastro Locator® In-Kone® A 1.5 mm
DLOCPCIH3	Pilastro Locator® In-Kone® A 3 mm
DLOCPCIH4	Pilastro Locator® In-Kone® A 4 mm
DLOCPCIH5	Pilastro Locator® In-Kone® A 5 mm
DLOCATORPACK	Femmina Locator® In-Kone® (x 2)
DLOCJ0	Sachetto di 4 inserti neri In-Kone®
DLOCJ1	Sachetto di 4 inserti blu In-Kone® 668 g 20°
DLOCJ2	Sachetto di 4 inserti rosa 1361 In-Kone® 1361 g 20°
DLOCJ3	Sachetto di 4 inserti bianchi In-Kone® 2268 g 20°
DLOCJ4	Sachetto di 4 inserti rossi In-Kone® 450 g 40°
DLOCJ5	Sachetto di 4 inserti verdi In-Kone® 1810 g 40°
DLOCJ6	Sachetto di 4 inserti arancio In-Kone® 910 g 40°
DLOCTRANSFERT	4 transfert d'impronta Locator® In-Kone®
DLOC4MMANALOG	4 analoghi per Locator® In-Kone®

Strumentario protesico

Kit protesici

DPCIKIT	Kit protesico completo
DCCIPS	Kit protesico vuoto

Cacciaviti / Chiavi

DCM1.2C	Cacciavite manuale corto esagonale 1.2 mm, L 9 mm
DCM1.2	Cacciavite manuale standard esagonale 1.2 mm, L 15 mm
DCM1.2L	Cacciavite manuale lungo esagonale 1.2 mm, L 20 mm
DCCA1.2C	Cacciavite contrangolo corto esagonale 1.2 mm, L 18 mm
DCCA1.2	Cacciavite contrangolo standard esagonale 1.2 mm, L 26 mm
DCDYN-2	Chiave dinamometrica
DCPOPC	Chiave manuale corta per transfert d'impronta
DCPOPC-L	Chiave manuale lunga per transfert d'impronta
DTLOCAT	Cacciavite 3 in 1

Avvitatori / Estrattori

DPPOAF	Avvitatore per pilastro conico angolato
DPFMCIC	Avvitatore per moncone corto, L 17 mm
DPFMCIL	Avvitatore per moncone lungo, L 23 mm
DPFMPCIC-2	Pinza corta di moncone 2-Ex e base d=5.5mm
DEMCI2	Estrattore manuale standard per moncone, L 17 mm
DEMCI2L	Estrattore manuale lungo per moncone, L 23 mm
DEMCI2-XL	Estrattore manuale extra lungo per moncone, L 30 mm
DEMPCI2-2	Estrattore manuale standard per moncone 2-Ex e base d=5.5mm A 1.5
DEMPCI2L-2	Estrattore manuale lungo per moncone 2-Ex e base d=5.5mm A 1.5-2.2-3-4

Monconi di prova

DAFCI4-4	4 monconi di prova dritti e angolati 7°-15°- 23°
DAFCI4-8	8 monconi di prova dritti e angolati 7°-15°- 23°

Viti unitarie o in sacchetto

DVPCI	Vite per protesi
DVTLPICCI	Vite per transfert Pick-up lungo
DVTCPICCI	Vite per transfert Pick-up corto
DVPLABCIH2-8	Sacchetto di 8 viti di laboratorio A 2 mm
DVPLABCIH12-8	Sacchetto di 8 viti guida A 12 mm
DVPIINK	Vite per moncone di pilastro conico 0°
DVTIPICINK4.3	Vite per transfert Pick-up di pilastro conico 0°
DVPIINKLABH2-8	Vite di laboratorio per pilastro conico 0° A 2 mm (x 8)
DVPIINKLABH12	Vite guida per pilastro conico 0° A 12 mm

DVPIINKLABH12-8
 DVPILAB4.3H22
 DVPILAB4.3H22-8
 DVPAOF
 DVTPICAOF-C
 DVTPICAOF-L
 DVPLABAOFH22
 DVPLABAOFH22-8

Vite guida per pilastro conico 0° A 12 mm (x 8)
 Vite guida di laboratorio per pilastro conico
 Vite guida di laboratorio per pilastro conico (per 8)
 Vite per monconi calcinabili titanio misti
 Vite per transfert Pick-up corto
 Vite per transfert Pick-up lungo
 Vite di laboratorio pilastro conico angolato, A 22 mm
 Vite di laboratorio pilastro conico angolato, A 22 mm (x 8)

Diversi

AMP
 DADMA
 DCPIMU

Manico per molare
 Adattatore manuale per attacco contrangolo
 Chiave manuale Universal per pilastri sferico e QUATTRO retti

Protesi Impianto 3.0

DVCITZ3.4H2
 DVCITZ3.4H4
 DVCITZ3.4H6
 DTDCPICTZ
 DATZ
 DFMPPTZ3.4H2
 DFMPPTZ3.4H4
 DFMTZ3.4H1-00
 DFMTZ3.4H2-00
 DFMTZ3.4H4-00
 DFMTZ3.4H6-00
 DFMTZ3.4H2-07
 DFMTZ3.4H4-07
 DFMTZ3.4H6-07
 DFMTZ3.4H2-15
 DFMTZ3.4H4-15
 DFMTZ3.4H6-15
 DEMENTZ
 DAMTZ

Vite di guarigione 3.0 - Ø 3.4 A 2 mm
 Vite di guarigione 3.0 - Ø 3.4 A 4 mm
 Vite di guarigione 3.0 - Ø 3.4 A 6 mm
 Transfert Pick-up corto, diretto
 Analogo d'impianto
 Moncone provvisorio indicizzato 3.0 - Ø 3.4 A 2 mm
 Moncone provvisorio indicizzato 3.0 - Ø 3.4 A 4 mm
 Moncone 3.0 - diritto Ø 3.4 A 1 mm
 Moncone 3.0 - diritto Ø 3.4 A 2 mm
 Moncone 3.0 - diritto Ø 3.4 A 4 mm
 Moncone 3.0 - diritto Ø 3.4 A 6 mm
 Moncone 3.0 - angolato 7° Ø 3.4 A 2 mm
 Moncone 3.0 - angolato 7° Ø 3.4 A 4 mm
 Moncone 3.0 - angolato 7° Ø 3.4 A 6 mm
 Moncone 3.0 - angolato 15° Ø 3.4 A 2 mm
 Moncone 3.0 - angolato 15° Ø 3.4 A 4 mm
 Moncone 3.0 - angolato 15° Ø 3.4 A 6 mm
 Estrattore manuale per moncone Impianto 3.0
 Attivatore manuale per moncone Impianto 3.0

Protesi twinkon® 4

DCCTWK
 DVCITWK5H2.6
 DVCITWK5H4
 DTCIPICVCE
 DTIPICVCE
 DTLIPICVCE
 DPCCEH1
 DPCCEH2
 DCCVCE
 DAICE
 DGCIVCE
 DGTIVCE
 DGMIVCE
 DPCTWK4.3
 DCCVTWK4.3
 DTIPICVTWK4.3
 DTIPOPTWK4.3
 DTNPCTWK4.3
 DAITWK4.3N
 DGCIVTWK4.3
 DGMIVTWK4.3
 DEVPCTWK4.3
 DPTWK4KIT
 DCCEPS
 DPEPCCE
 DCDYN-2
 DCM1.2
 DAMPCTWK4.3
 DEMCE

Cappetta di copertura per impianto twinkon® (inclusa nel packaging dell'impianto)
 Vite di guarigione twinkon® Ø 5 mm A 2.6 mm
 Vite di guarigione twinkon® Ø 5 mm A 4 mm
 Transfert Pick-up corto per pilastro conico
 Transfert Pick-up lungo per pilastro conico
 Transfert Pick-up extra lungo per pilastro conico
 Pilastro conico twinkon® Ø 5.4 mm A 2.4 mm
 Pilastro conico twinkon® Ø 5.4 mm A 3.4 mm
 Cappetta di copertura per pilastro conico
 Analogo per pilastro conico
 Moncone calcinabile per pilastro conico
 Moncone titanio per pilastro conico
 Moncone misto per pilastro conico
 Pilastro conico twinkon® Ø 4.3 mm H 2.9 mm
 Cappetta di copertura per pilastro conico twinkon® Ø 4.3 mm H 3 mm
 Transfert Pick-up per pilastro conico Ø 4.3 mm + vite
 Transfert Pop-up per pilastro conico Ø 4.3 mm
 Transfert digitale titanio per pilastro conico Ø 4.3 mm
 Moncone titanio
 Moncone calcinabile
 Moncone misto
 Base titanio
 Kit protesico twinkon® 4
 Kit protesico twinkon® 4 vuoto
 Chiave / Estrattore per pilastro conico
 Chiave dinamometrica Universal
 Cacciavite manuale Universal standard, esagonale, Ø 1.2 mm
 Attivatore manuale di pilastro conico twinKon d=4.3mm
 Estrattore di moncone twinKon medio e pilastro conico d=4.3

Global D Arsenale terapeutico




Impianti con spalla
intra-crestale
La chirurgia



Digital Solutions




twinkon®
La firma biologica

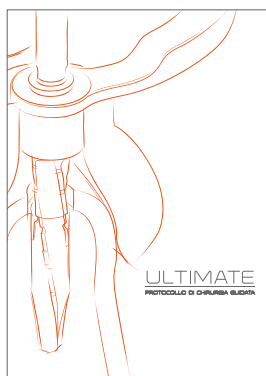


Ultimate
Protocollo di chirurgia
guidata




In-Kone®
Manuale chirurgico

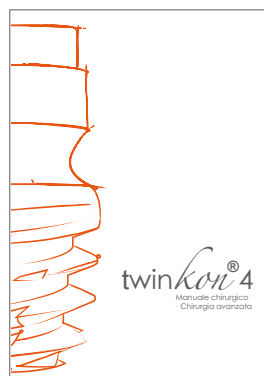


twinkon® 4
Manuale chirurgico

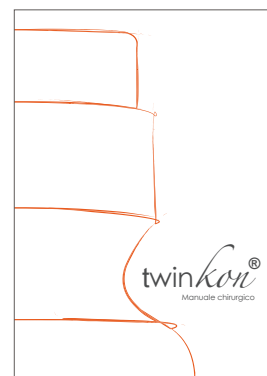

twinkon®
Manuale chirurgico

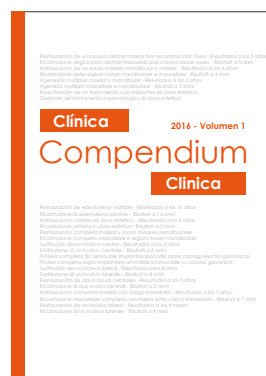

Compendium Vol.1

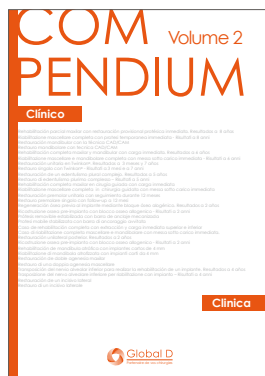

Compendium Vol.2

Campi di attività

Implantologia

Chirurgia orale

Chirurgia preimplantare

Chirurgia ortognatica

Chirurgia ricostruttiva

Chirurgia traumatologica del viso

Chirurgia oncologica

Chirurgia cranica

Ortodonzia

Formazione



Tekka Srl
Via degli Abeti, 348
61122 Pesaro (PU)
ITALIA

tel. (+39) 0721 40 36 63
fax (+39) 0721 26 99 94

www.tekkaglobald.it

Una società del gruppo MENIX