



# Casquillos INSTRUCCIÓN TÉCNICA



ZI de Sacuny  
118 Avenue Marcel Mérieux, 69530 BRIGNAIS  
Tel.+33 (0)4 78 56 97 00  
Fax +33 (0)4 78 56 01 63  
www.globald.com

Este documento tiene por objetivo explicar las instrucciones de uso de los casquillos o "Master tubes" de la marca STECO®. Están hechos para férulas quirúrgicas según protocolos con fresas pilotadas o según protocolos de fresado completo así que para fijar férulas en boca con pasadores o tornillos.

**Global D propone una gama de casquillos o "Master tubes" de marca STECO® para la fabricación de férulas quirúrgicas según protocolos con fresas pilotadas o según protocolos de fresado completo así que para fijar férulas en boca con pasadores o tornillos.**

El diseño de la férula quirúrgica se hace previamente gracias a la planificación de los implantes por el dentista. Se fabrica por impresión 3D con la mejor precisión posible en la clínica del dentista o posiblemente con su laboratorio protésico o por cualquier profesional que ofrece este servicio. A continuación, los casquillos están colocados, por pegamento si es necesario, en los orificios previstos durante la planificación.

Global D aconseja ajustar previamente la impresora 3D con la mejor tolerancia posible entre el diámetro interno del orificio de la férula y el diámetro externo del casquillo para obtener la mejor retención posible de cada tipo de casquillo.

A continuación, encontrarán la **gama completa de casquillos** o "Master tubes" de la marca STECO® distribuidos por **Global D** :

		Referencia Global D	Referencia Steco®
Casquillos para férulas según protocolo con fresa pilotada G20	Pack de 10	DMTS2.0L5	M.27.31D200L5
Casquillos para férulas según protocolo de fresado completo G42	Pack de 5	DMTS4.2L4	M.27.15.D420
Casquillos para férulas según protocolo de fresado completo G52	Pack de 5	DMTS5.2L4	M.27.15.D520
Casquillos para pasadores	Pack de 10	DMTS1.5L10	M.27.20.D150L10
Casquillos para tornillos Graftek ref VA1.5KL11 /KL13 /KL15	Pack de 10	DMTS1.5L6	M.27.03.D150L6



\* Los Casquillos (réf DMTS2.0L5 , DMTS4.2L4, DMTS5.2L4, DMDMTS1.5L6 et DMTS1.5L10) son dispositivos médicos fabricados y marcados CE por STECO system technik GmbH &Co.